




매뉴얼

체성분





- 1 ▶ 구글 플레이스토어 또는 애플 앱스토어에서 **피트니스**를 검색해 내려받습니다.

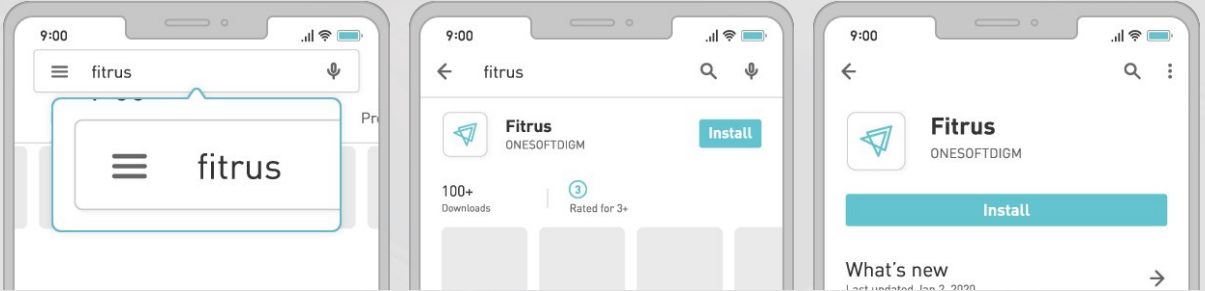

아래 버튼을 클릭해 스마트폰에 **피트니스 앱**을 내려받을 수 있습니다.


↓ 피트니스 앱 내려받기

- 2 ✧ 블루투스 기능을 켜고 **피트니스 앱**을 실행해주시시오.

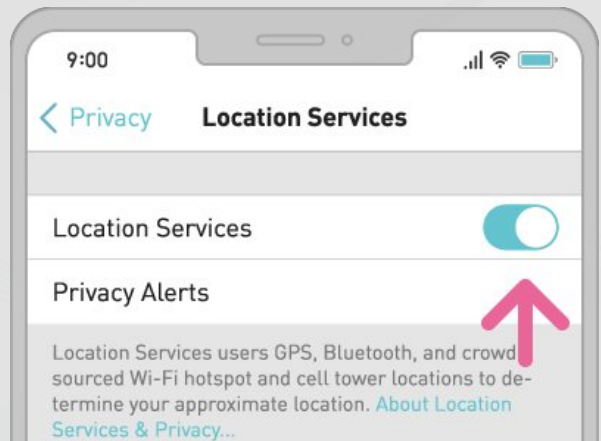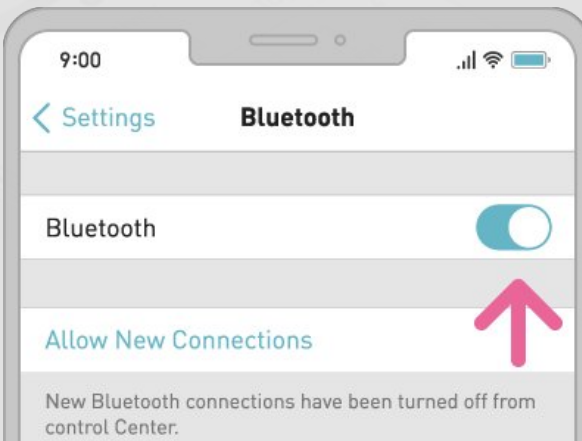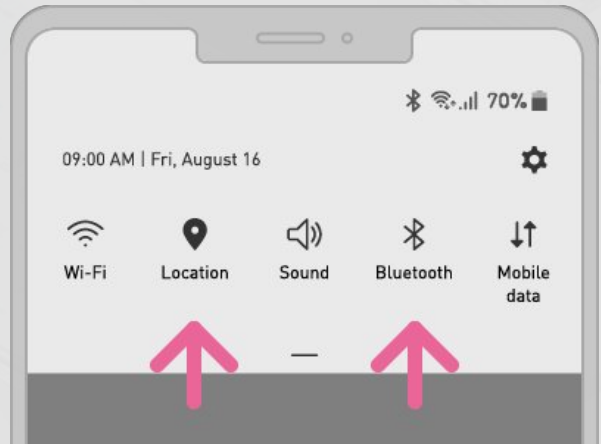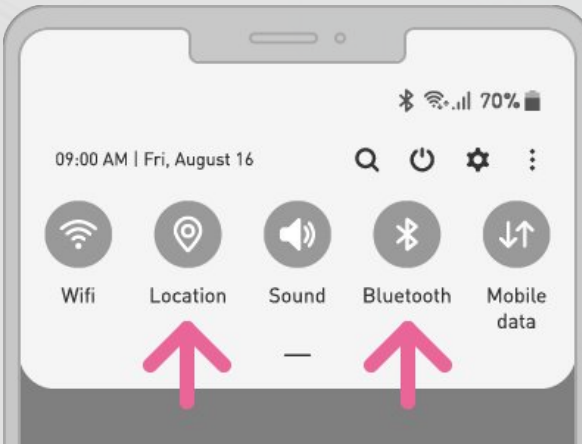






스마트폰에서 직접 * 블루투스를 연결하거나 PIN 번호를 입력하지 않아도 됩니다.


3 계정을 생성하고 사용자 정보를 입력합니다.

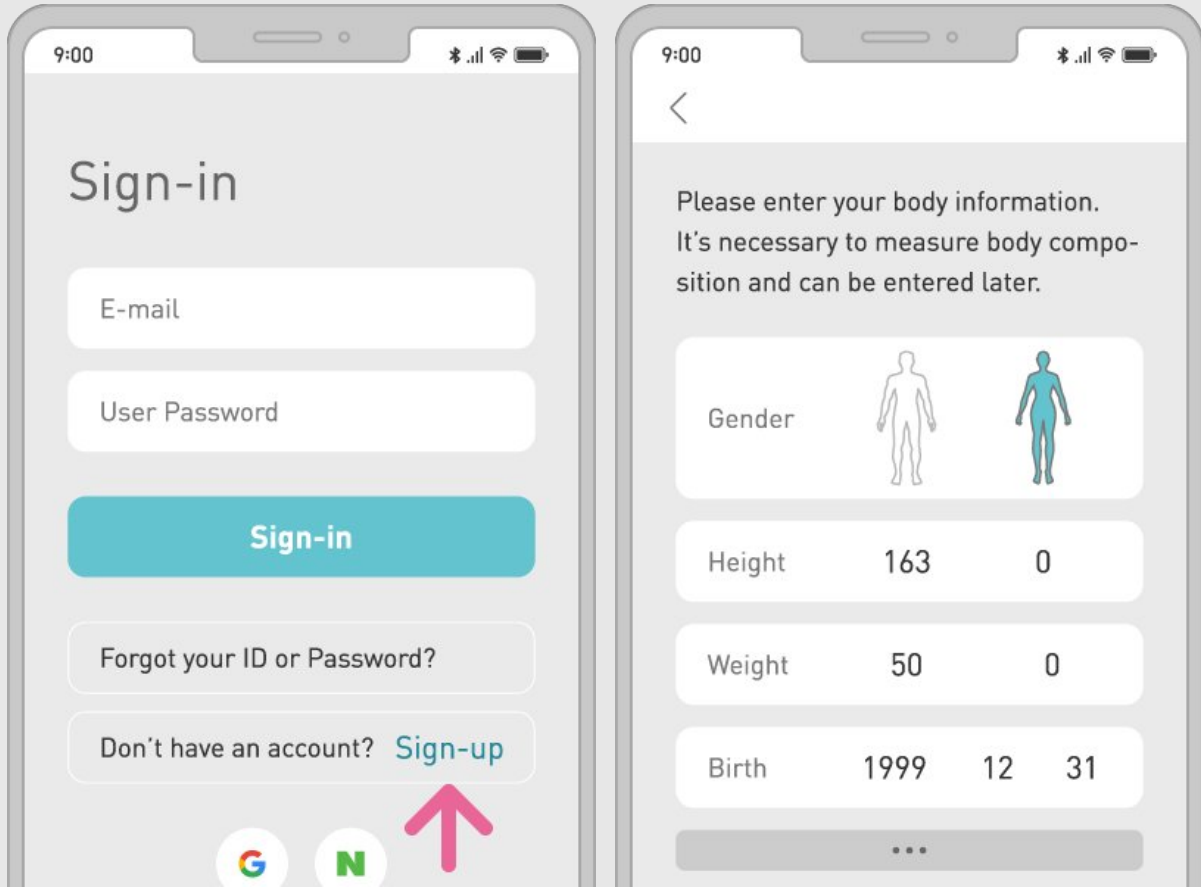

4 피트니스 플러스 전원을 켜고, 측정 화면에서 측정 > 시작을 차례로 누릅니다.

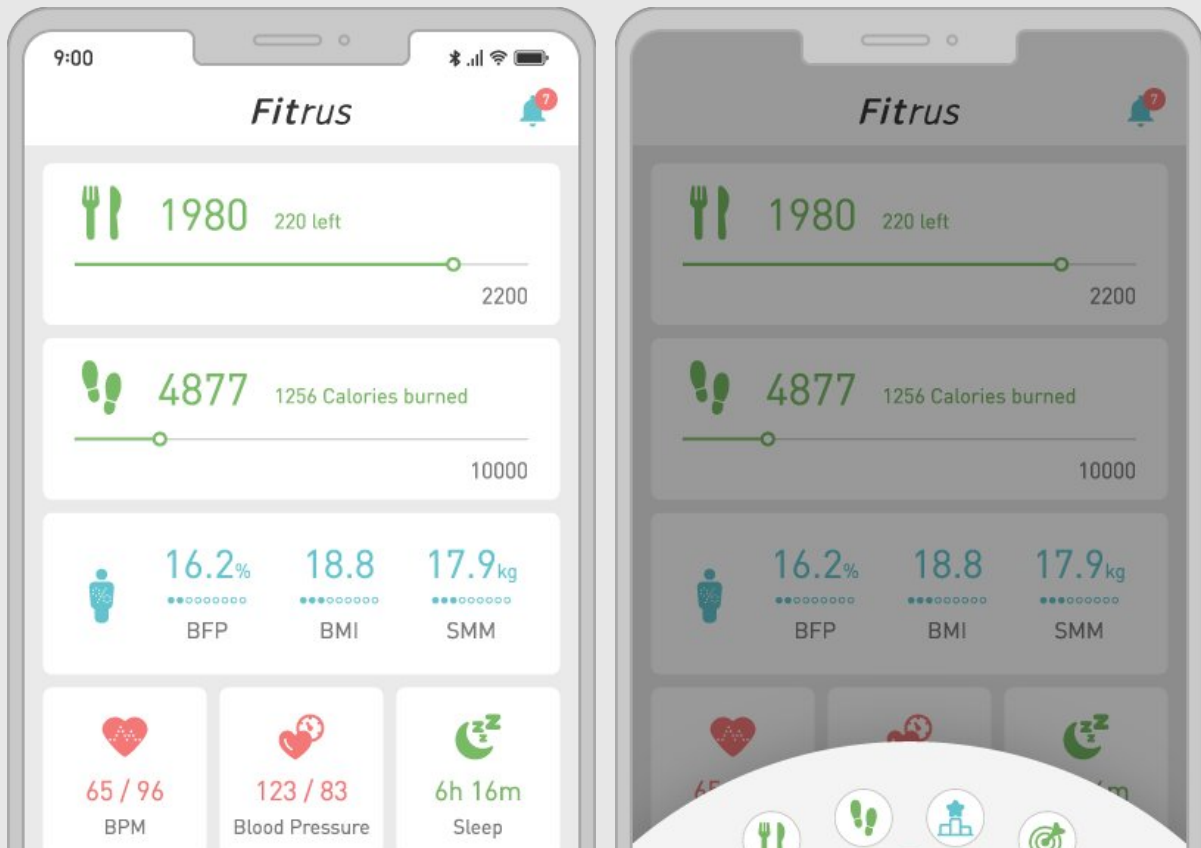

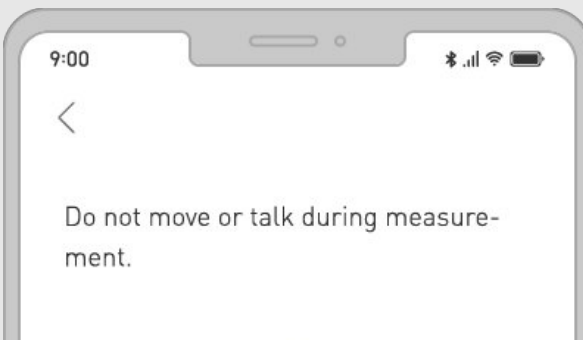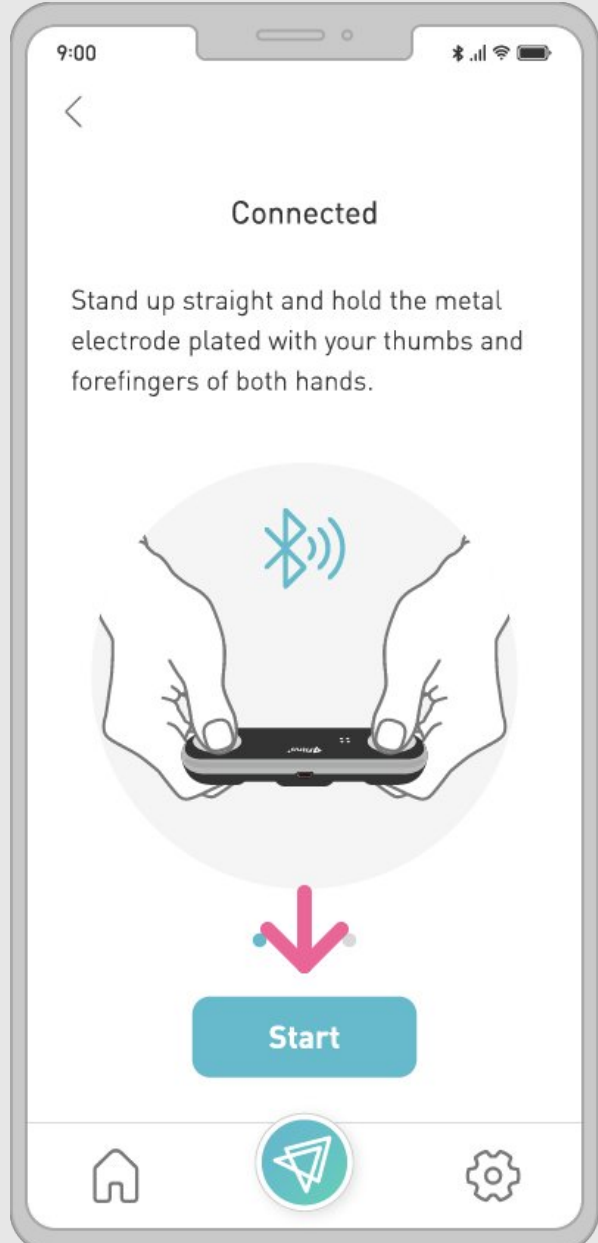
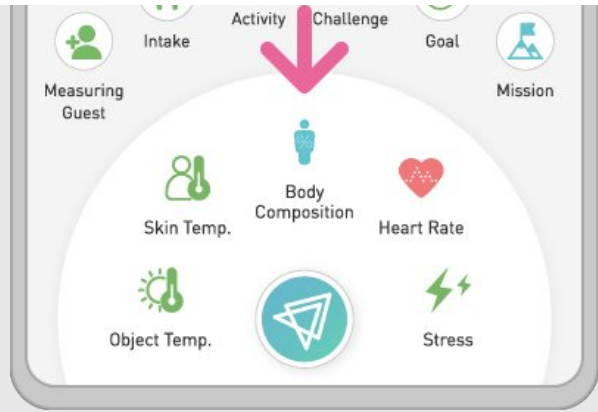
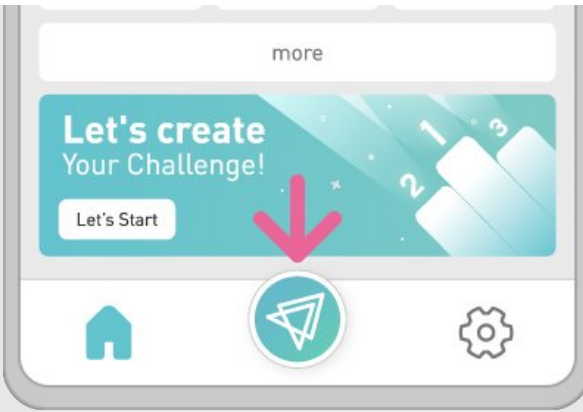


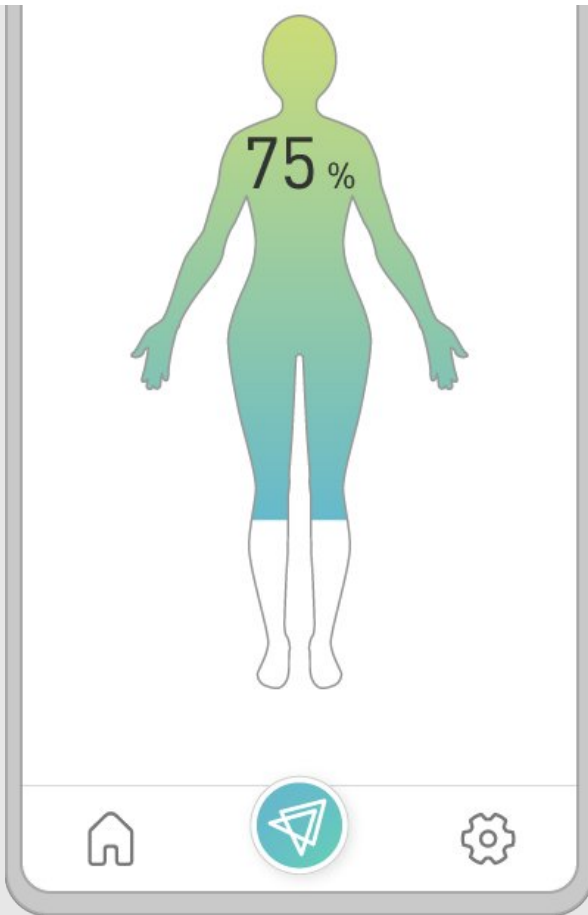


정상 연동되면 아래와 같이 디스플레이에 표시됩니다.





- 5 네 개의 전극을 엄지와 검지로 살짝 잡고 팔을 앞으로 쪽 뻗습니다.
팔꿈치를 펴고 양손을 붙이지 않으며 말하지 않아야 합니다.

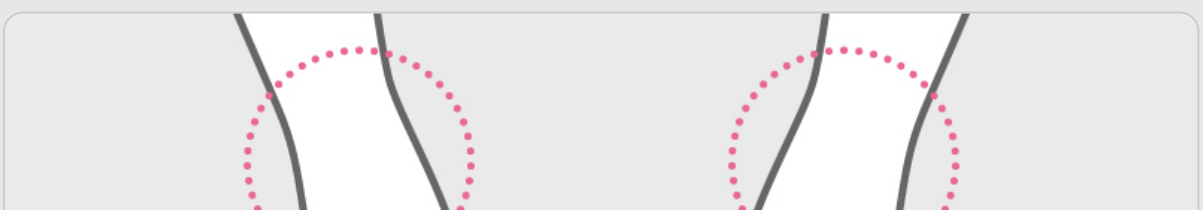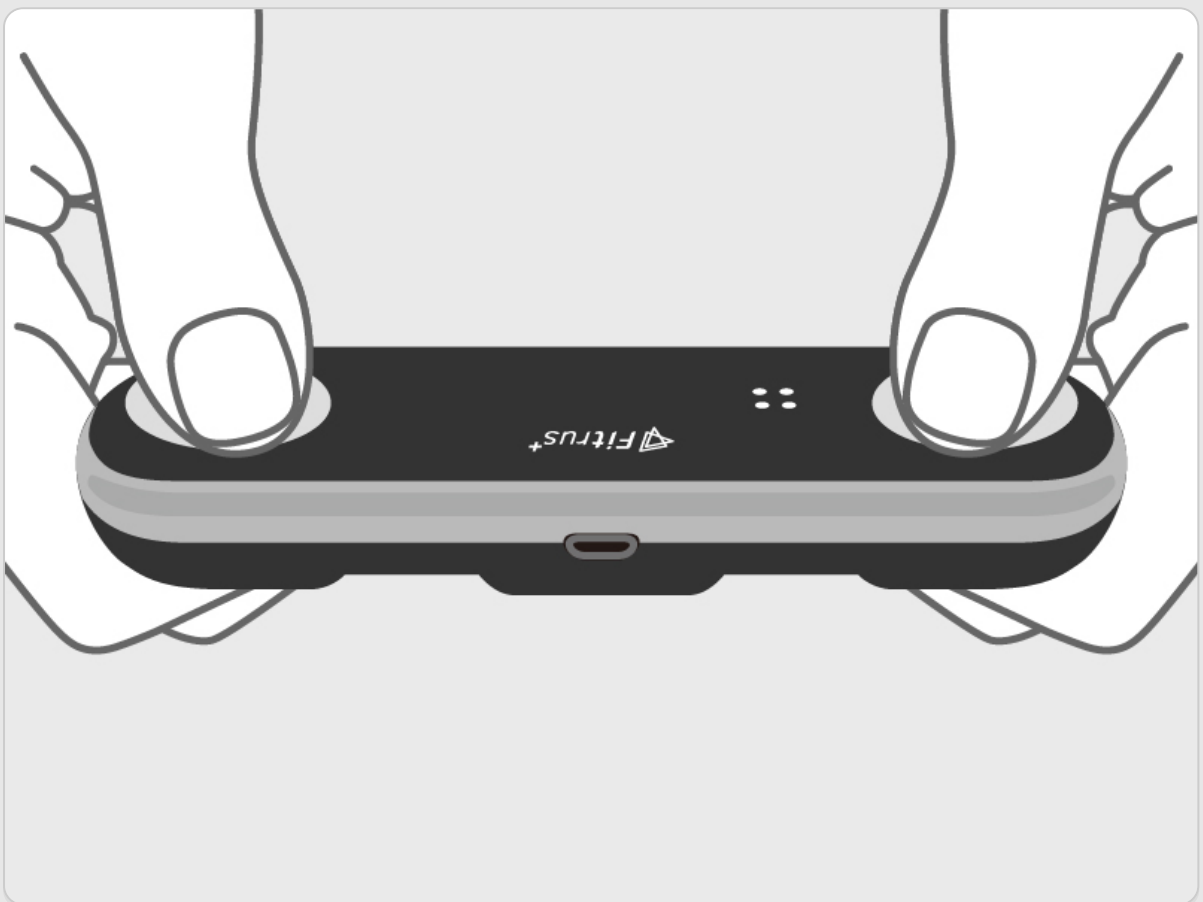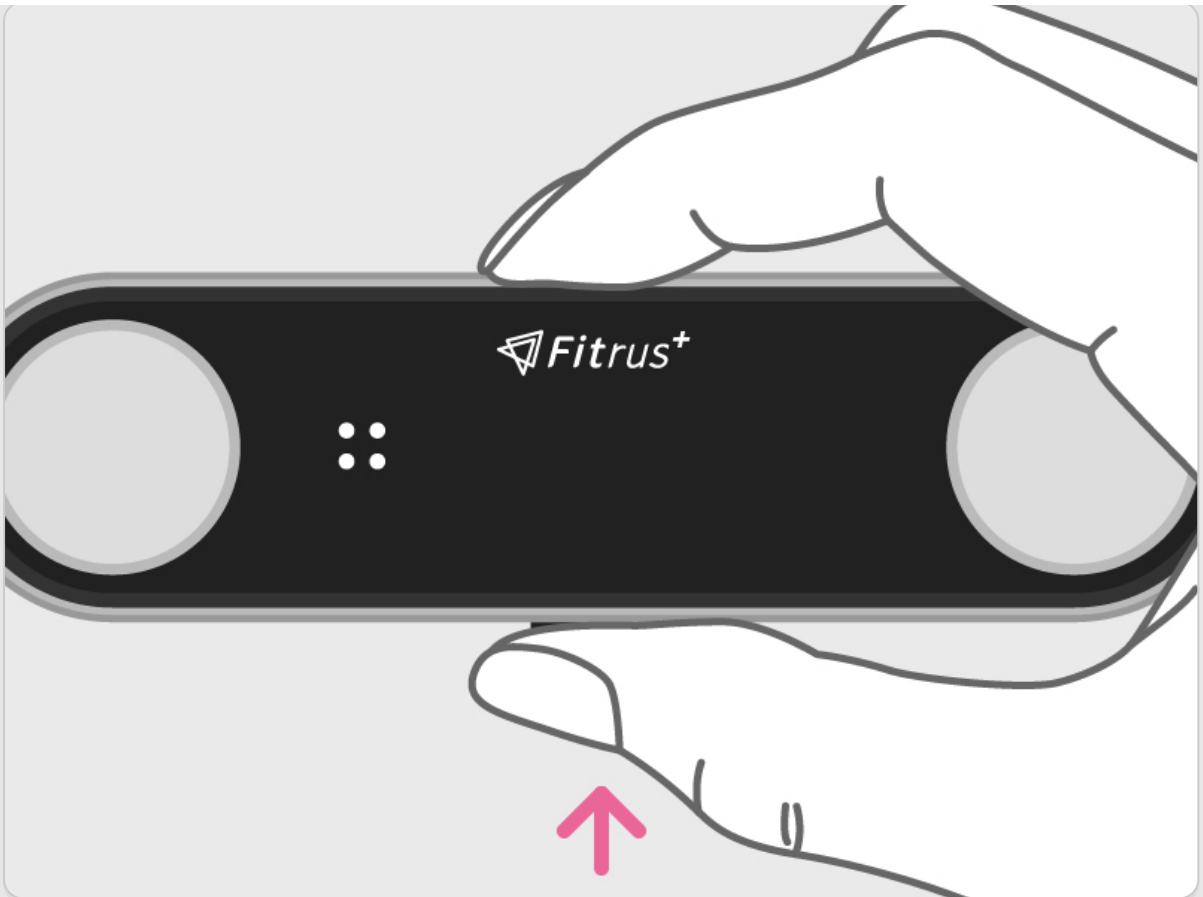

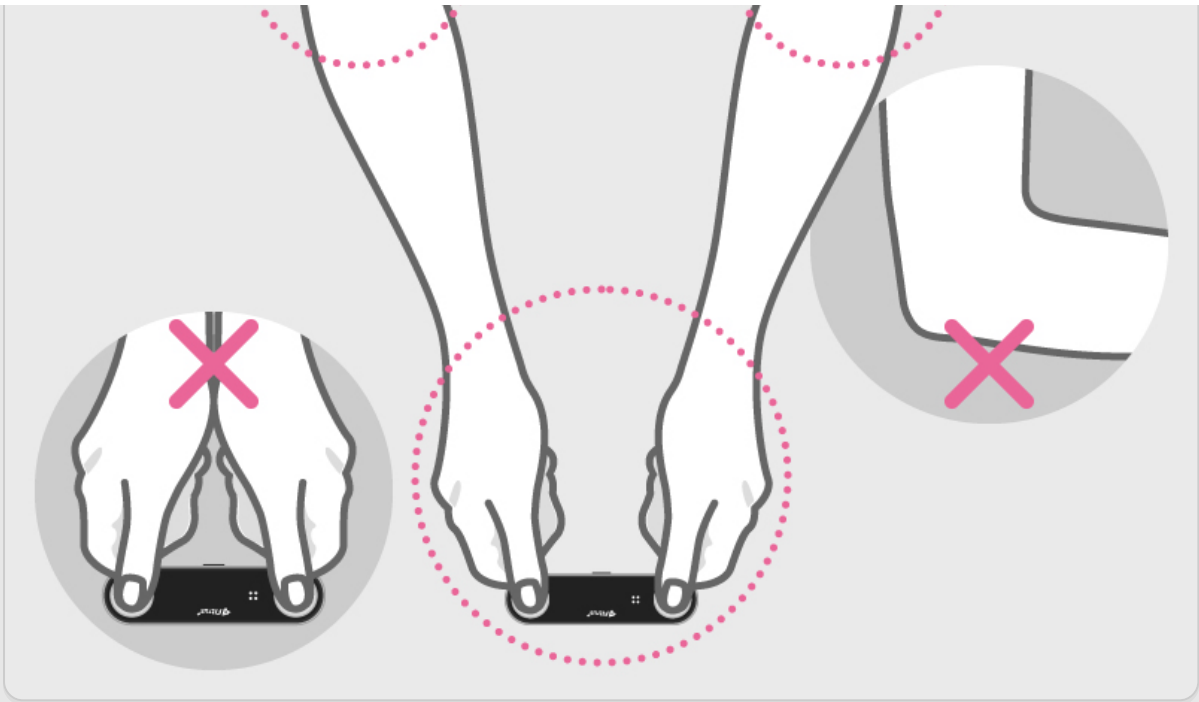

피트니스 플러스가 미세한 전류를 일정한 주기로 5초간 흘려보내는 생체전기저항분석법 (Bioelectrical Impedance Analysis)으로 측정되므로 바른 측정 자세를 취해 측정해야 합니다.

6 피트니스 앱에서 측정 결과를 확인할 수 있습니다.

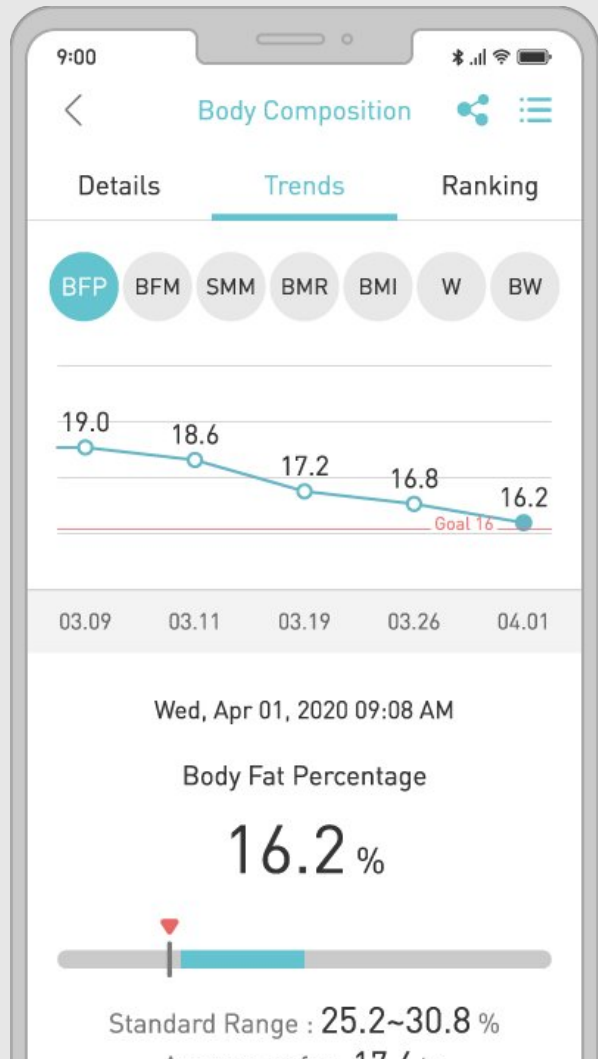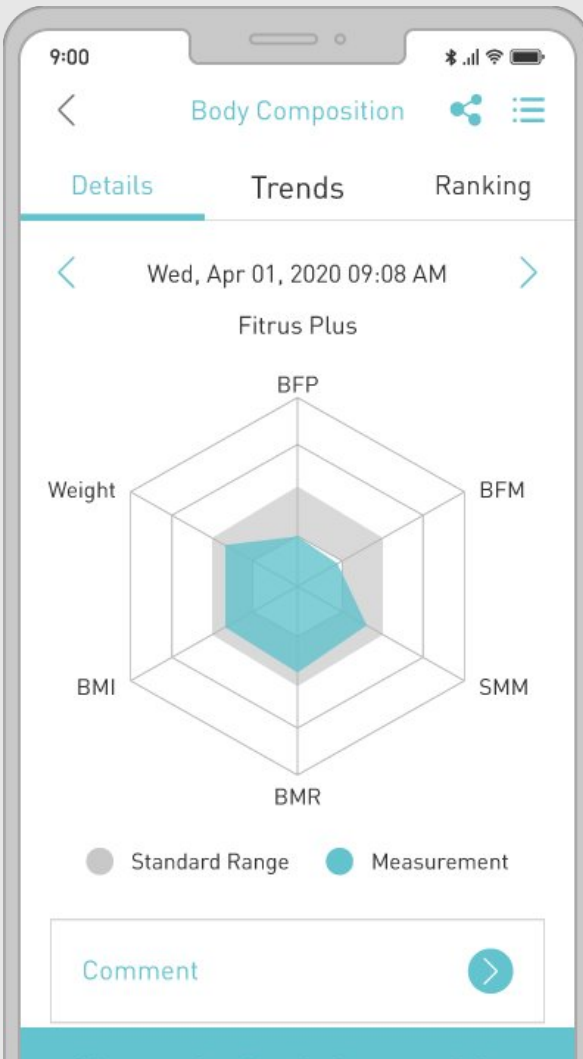

Measuring Body Composition



상세

9:00

Body Composition

Details Trends Ranking

All users

• My position • Average

Your total body score is based on the most recent measurement within a month.

My Score	Average Score
85.2	70.3

Home Measuring Body Composition Settings

랭킹

Average so far : 17.4 kg



트렌드

9:00

Comment

Analysis Guidance

My body now

Ecto 236 Type

● STANDARD ZONE

Body Score	Body Age	Proper BFP
90 pt	20 yrs old	16.2 %

You are probably an inconsistent gym member. If you do

Home Measuring Body Composition Settings

분석

9:00


Comment

Analysis Guidance


The amount of exercise is a bit insufficient, You should have at least 3 exercise habits a week. You need to improve your eating habits for your health. Also, You're lack of activity a lot. Please increase your physical activity a lot. Please increase your physical

9:00

Recommended Exercise

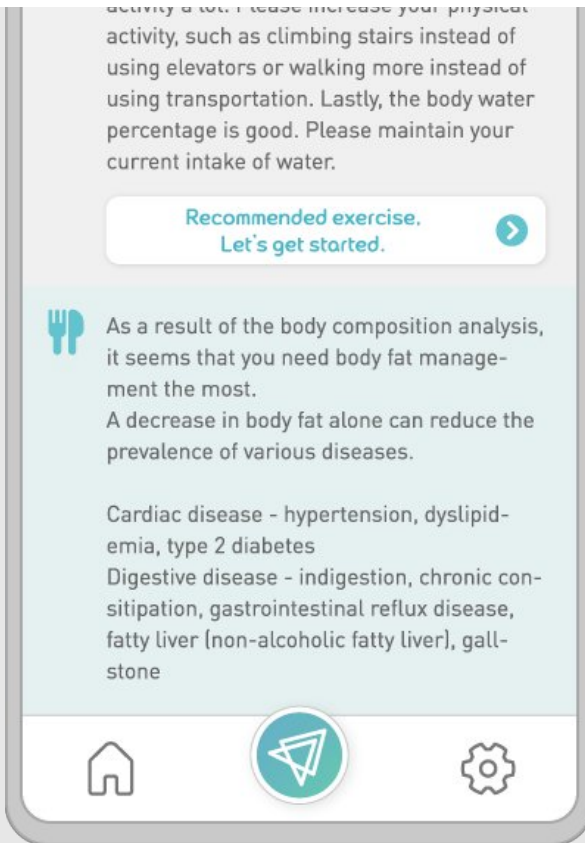

가이드

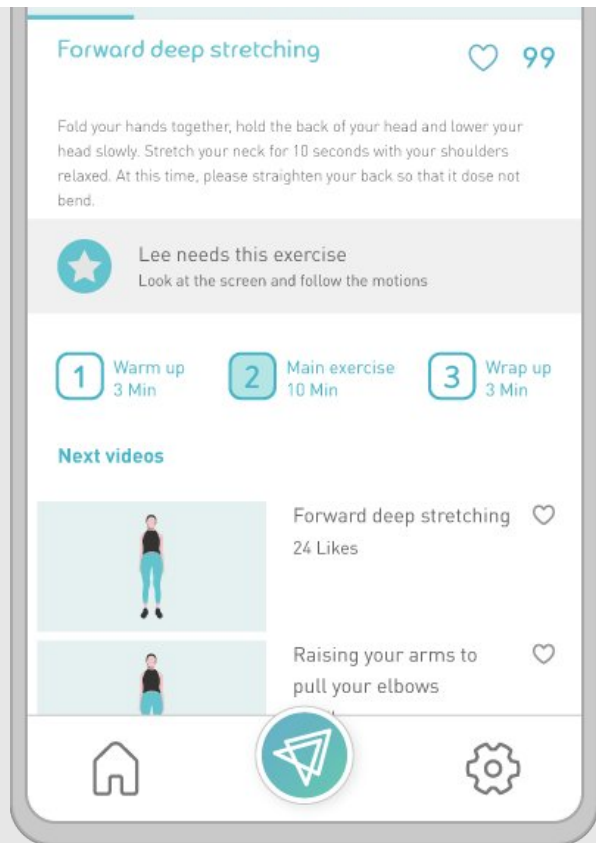

추천 운동


(주)원소프트다임의 자체 알고리즘으로 체성분에 따라 체형을 구분합니다.





사용자를 세 가지 유형, 25가지 체형으로 구분하고 총 139개의 신체 상태와 건강 정보를 안내합니다.



- 7 피트니스 앱은 꾸준한 업데이트로 유지·관리됩니다.
원활하게 사용하려면 피트니스 앱을 최신 버전으로 업데이트해주시요.

피부·사물온도



- 1 피트니스 플러스 전원을 켜고, 측정 화면에서 측정 > 시작을 차례로 누릅니다.

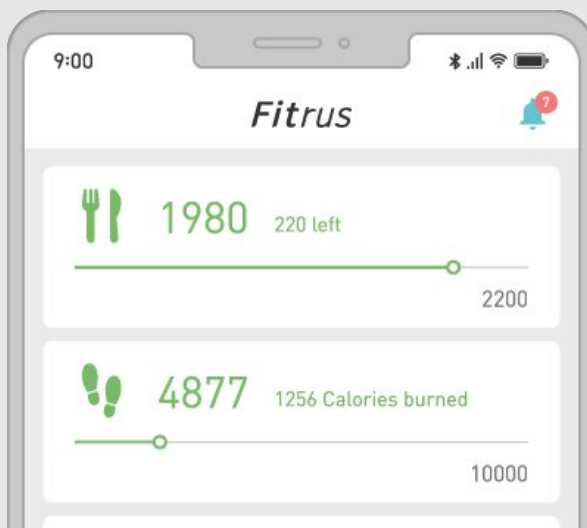

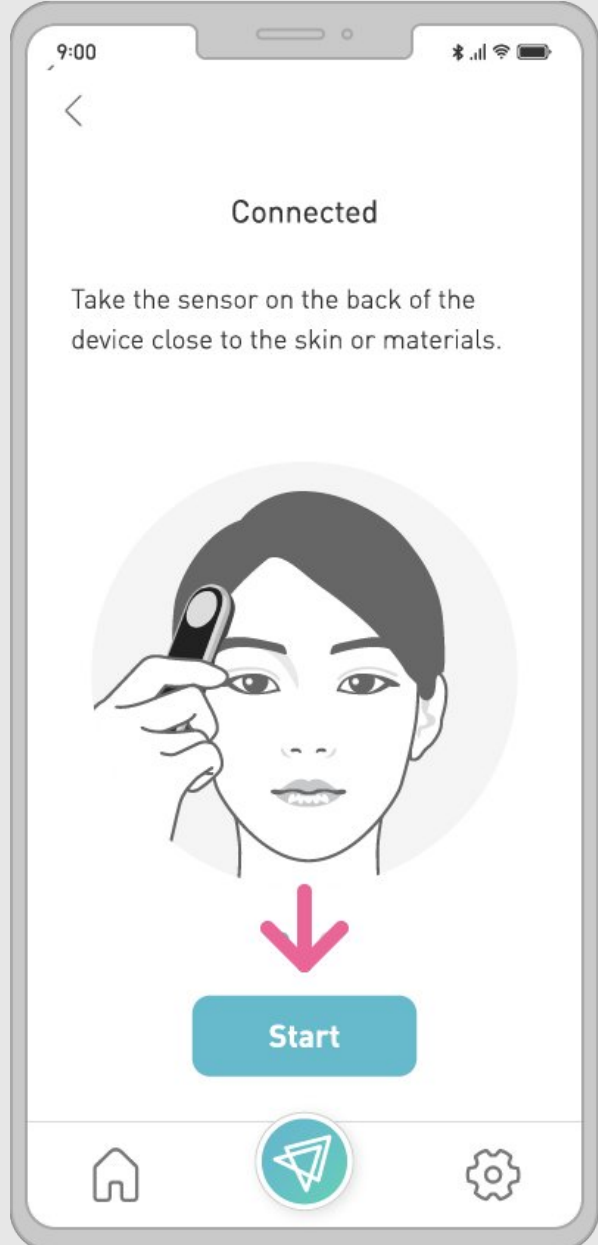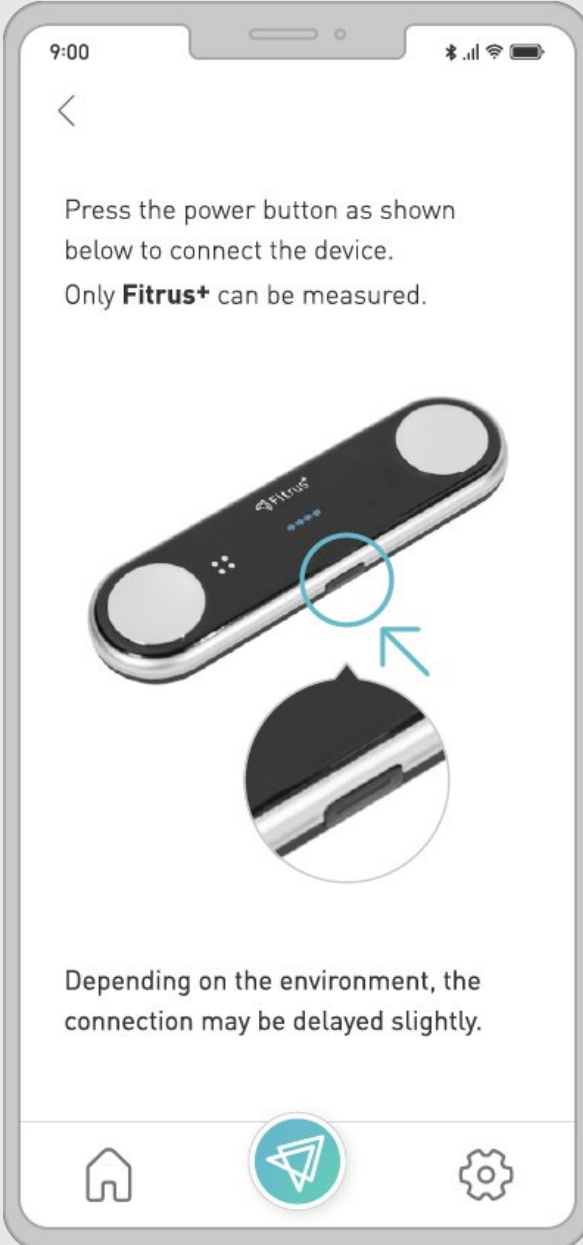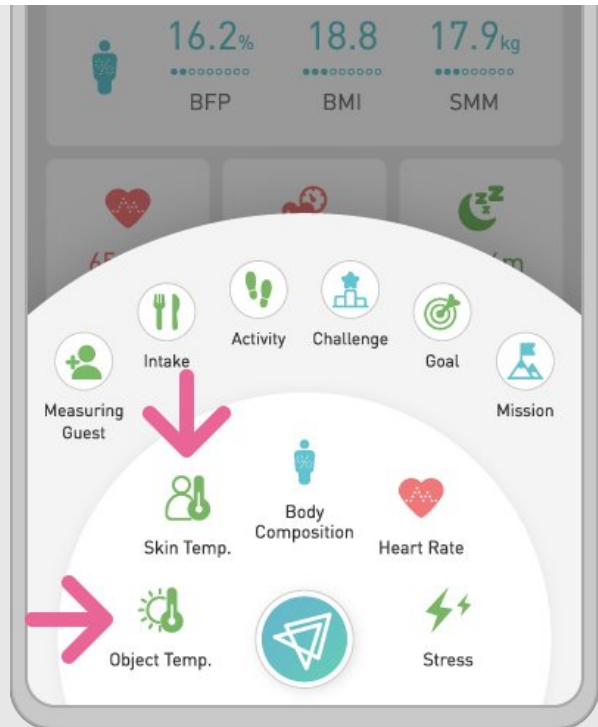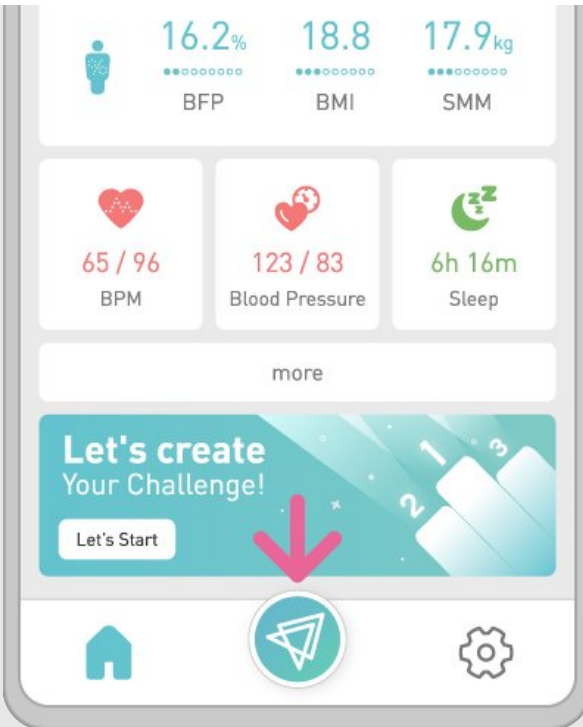

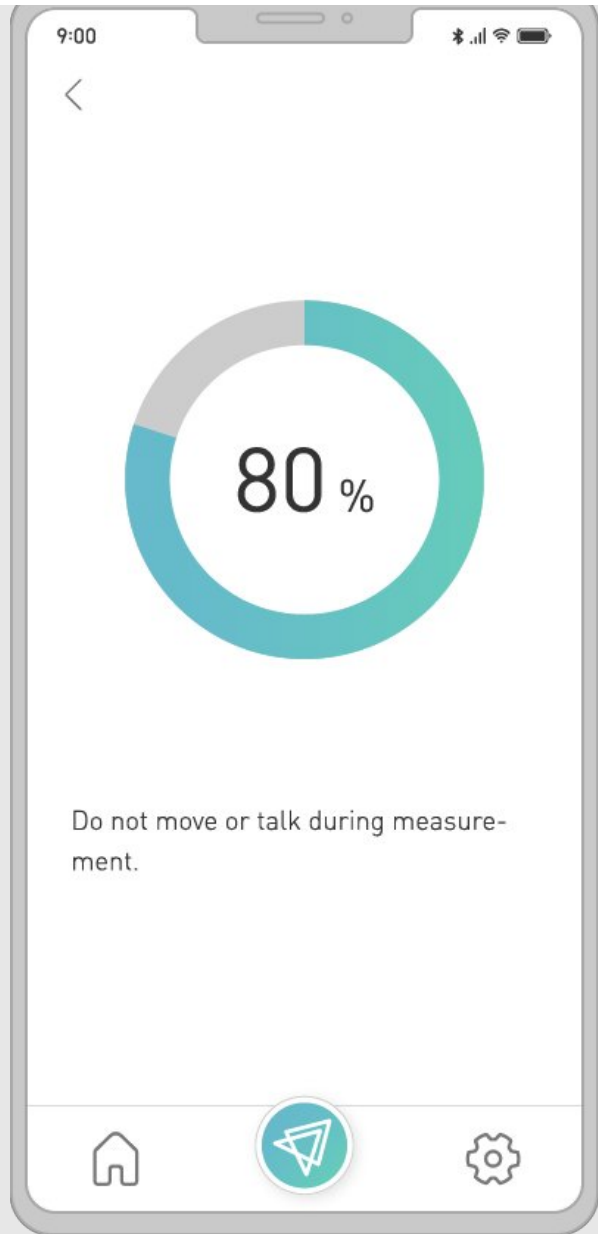
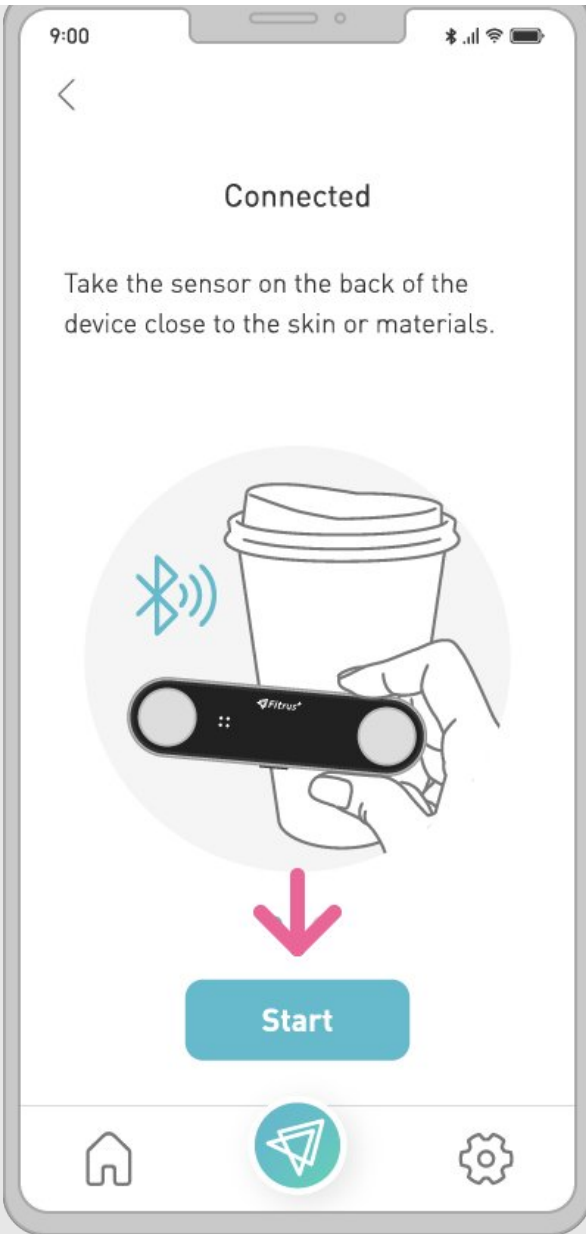





정상 연동되면 아래와 같이 디스플레이에 표시됩니다.

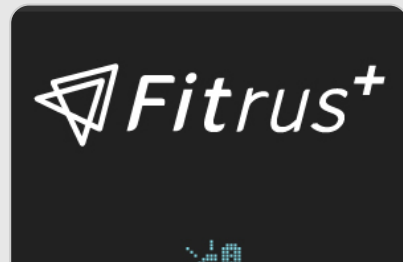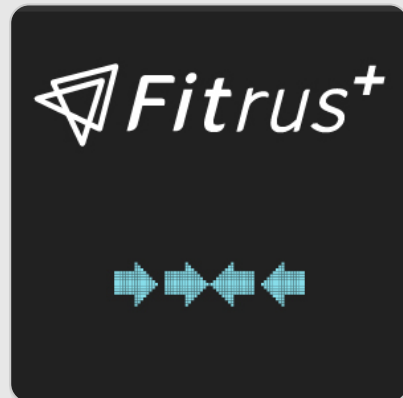

The logo for Fitrus+ features a stylized white triangle icon to the left of the text "Fitrus+" in a white, sans-serif font.


- 2 뒷면의 동근 센서를 측정할 피부 또는 물체의 약 2~5cm 가까이 위치시킵니다.
관자놀이에 측정하면 체온에 가까운 값을 얻을 수 있습니다.

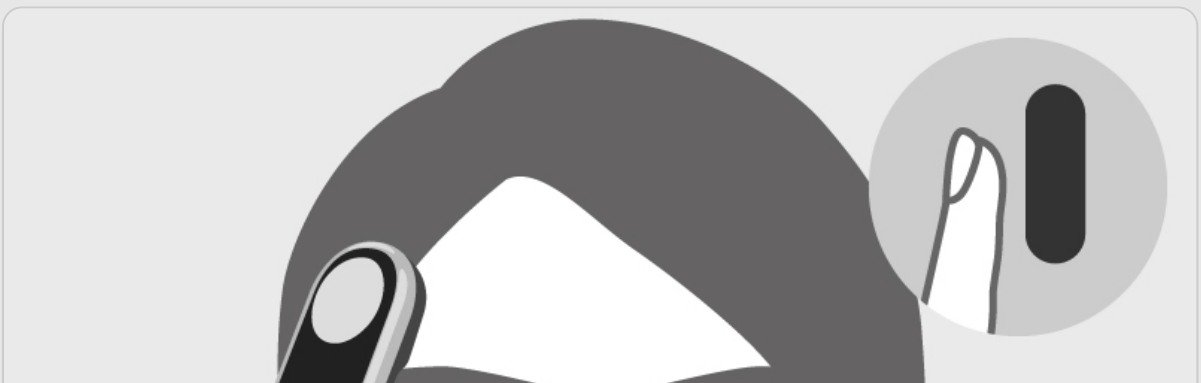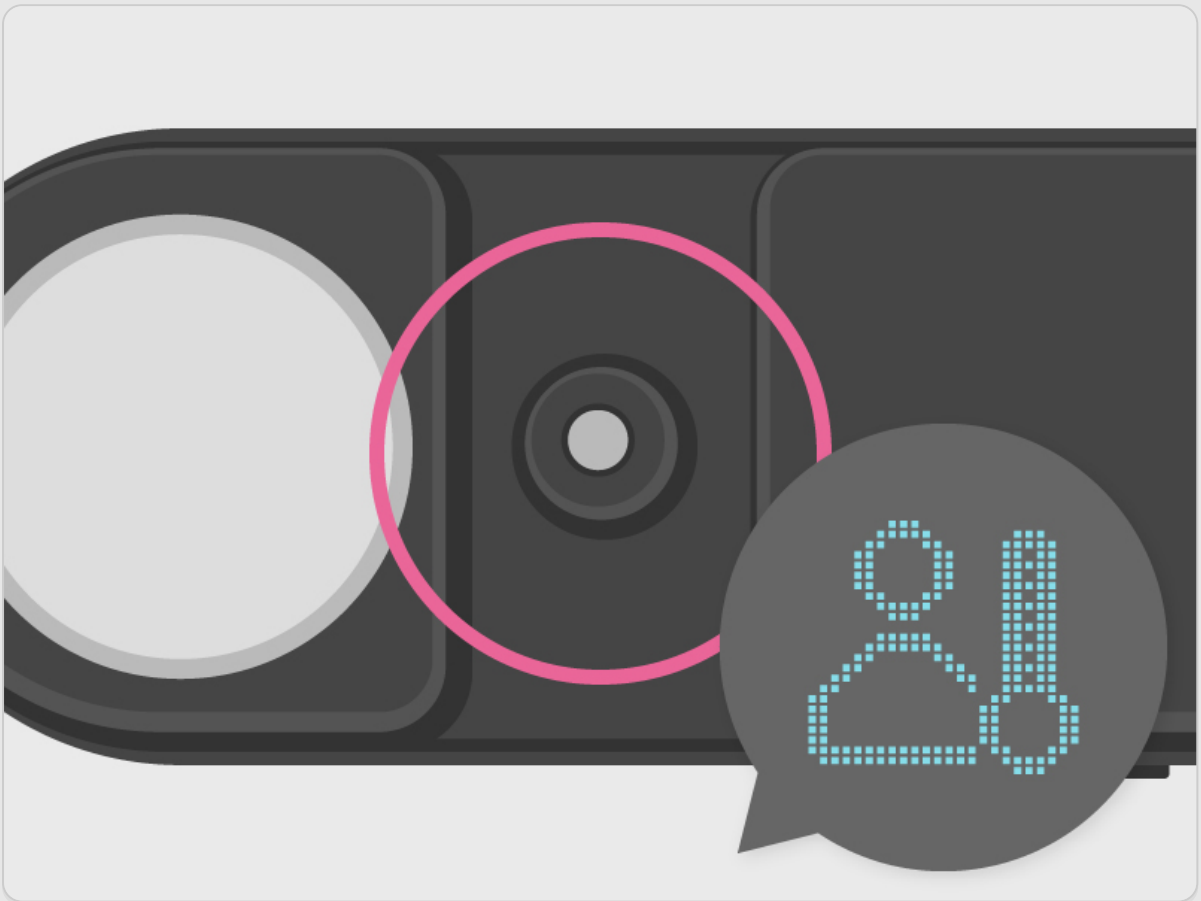

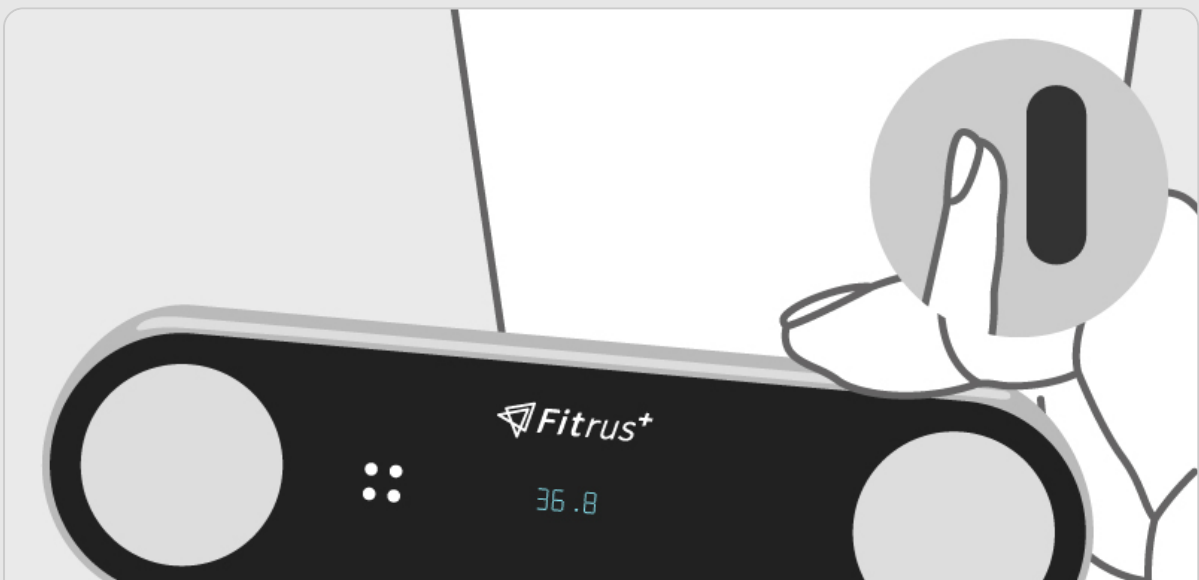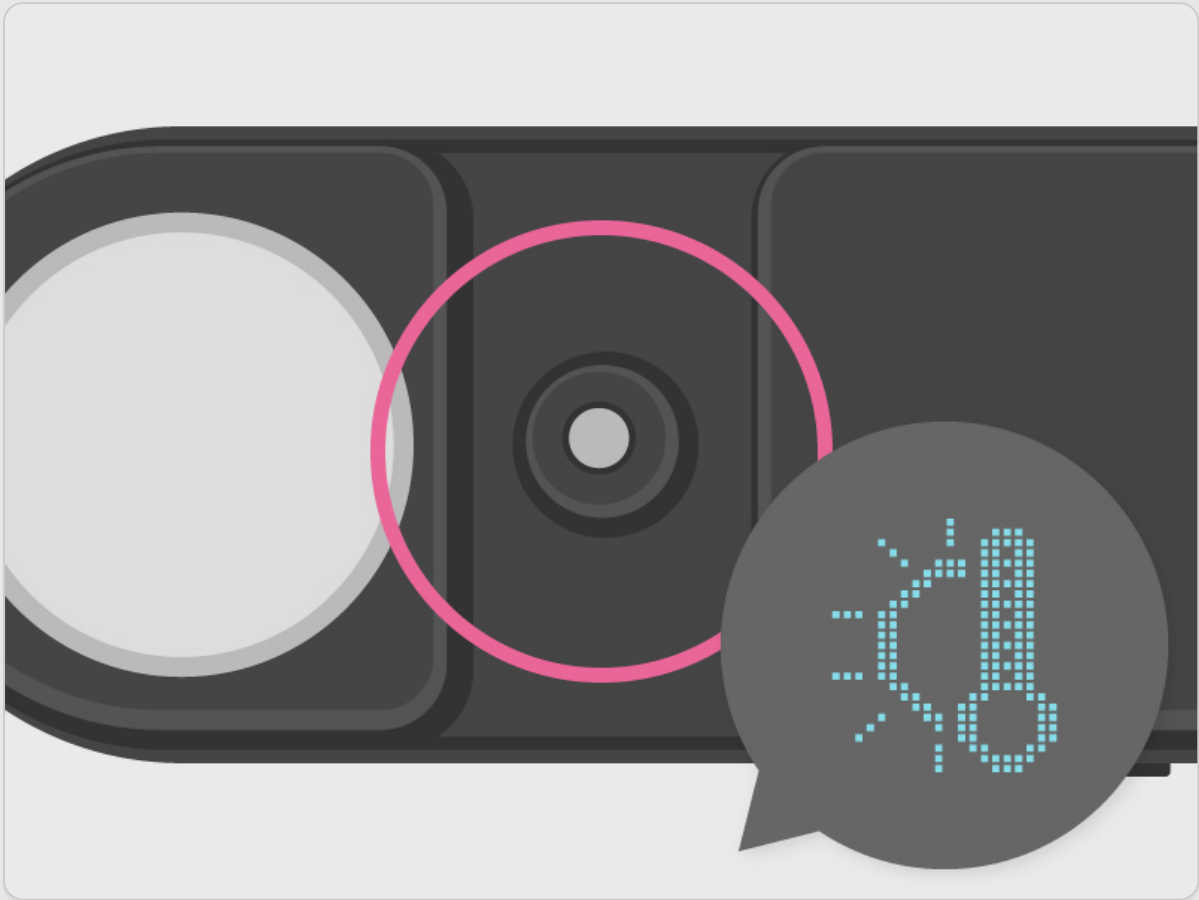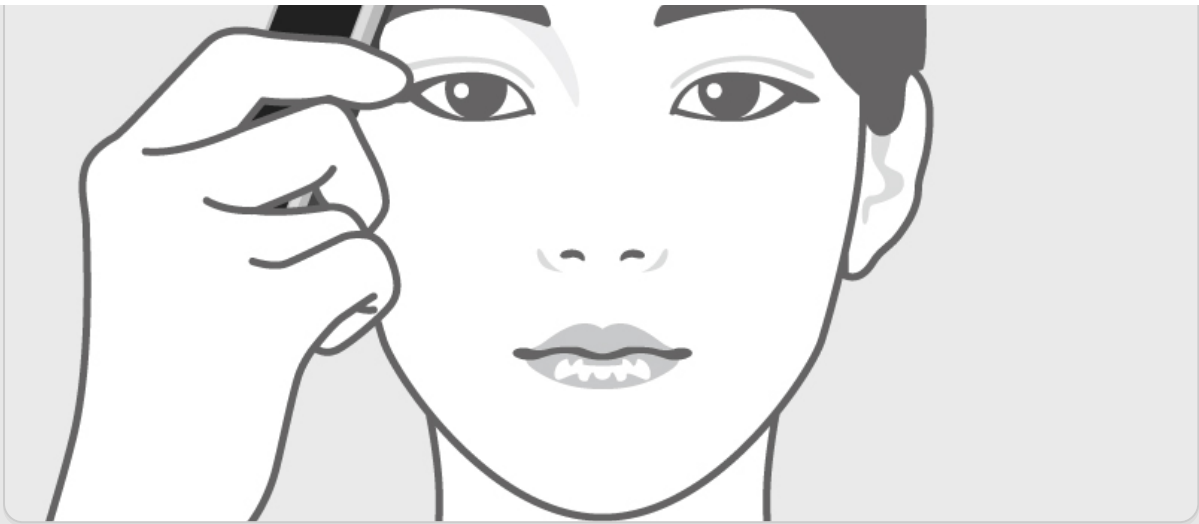




3 피트러스 앱에서 측정 결과를 확인할 수 있습니다.

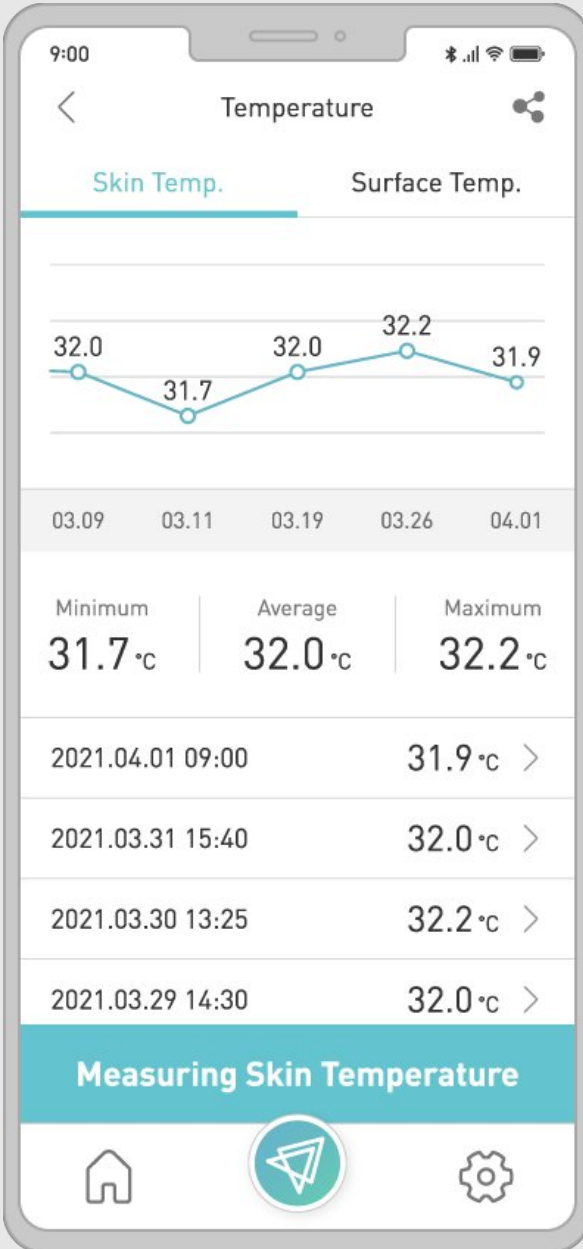


피부온도

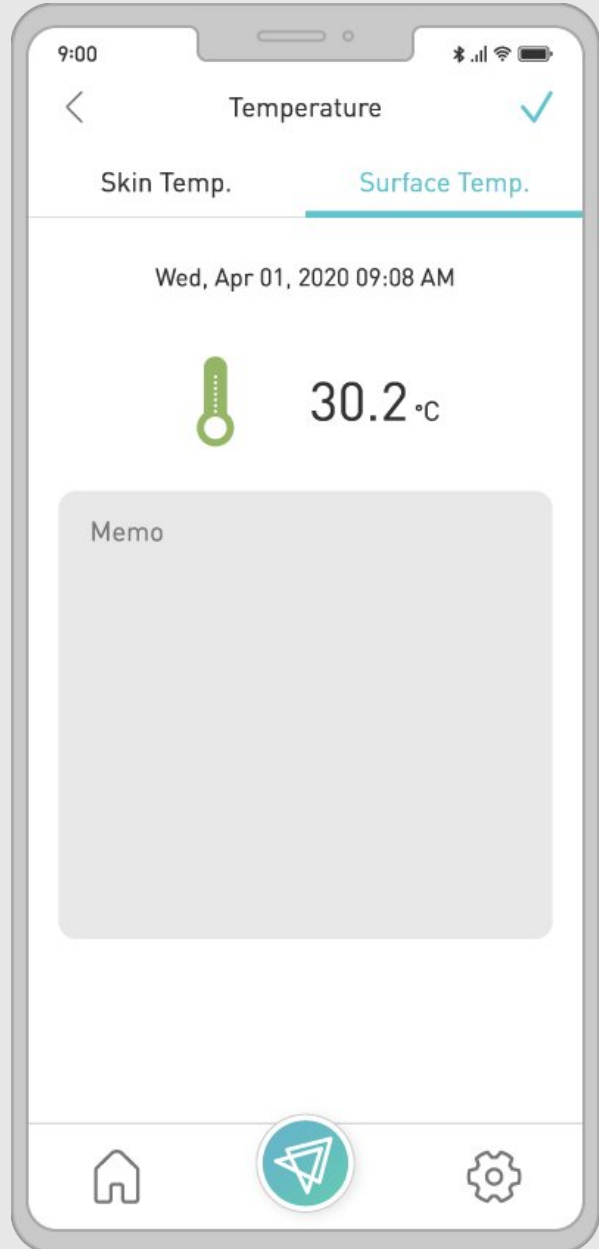

사물온도








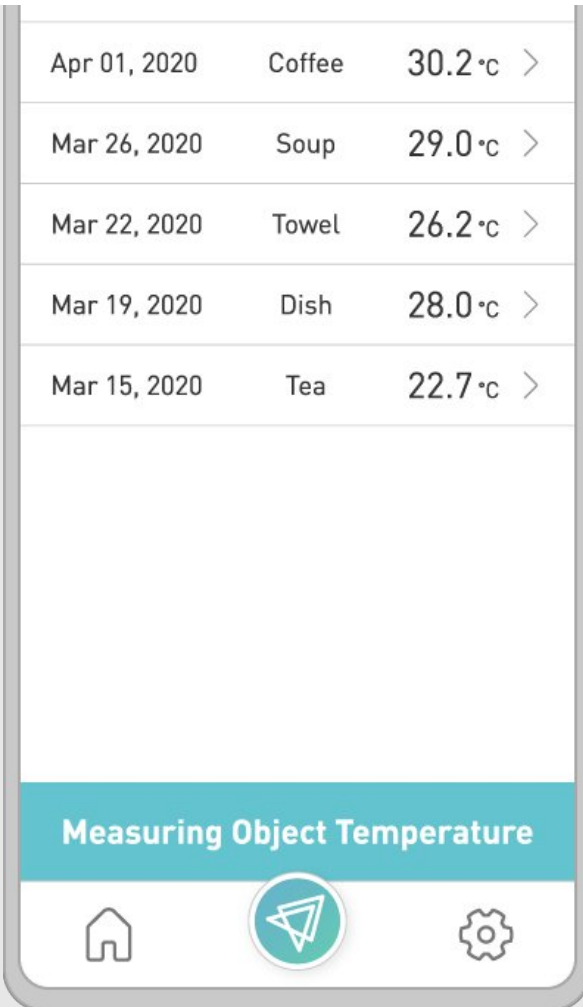



사물온도

심박수·스트레스



- 1 피트니스 플러스 전원을 켜고, 측정 화면에서 측정 > 시작을 차례로 누릅니다.

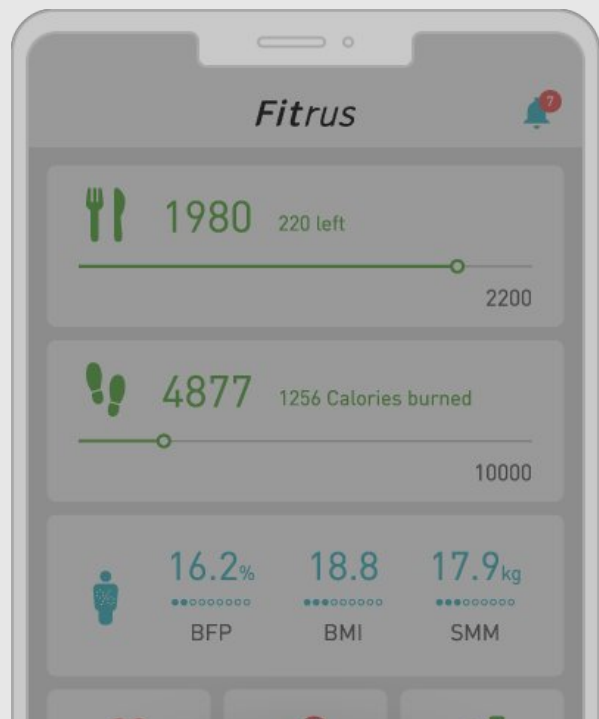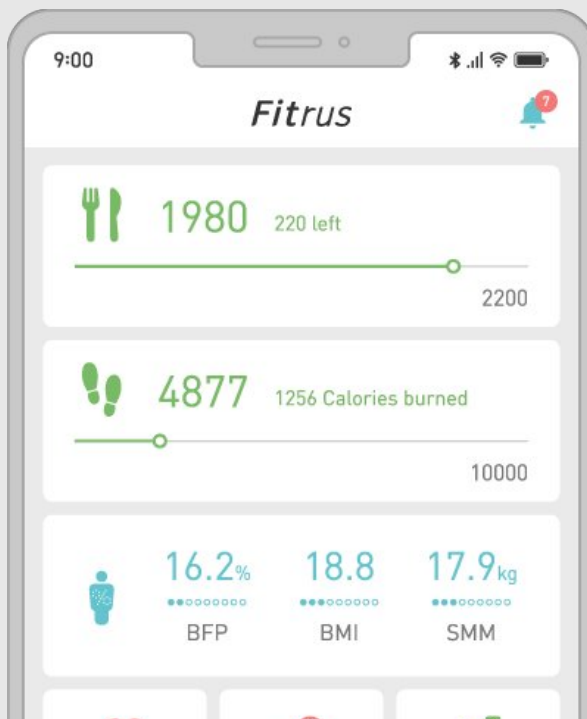

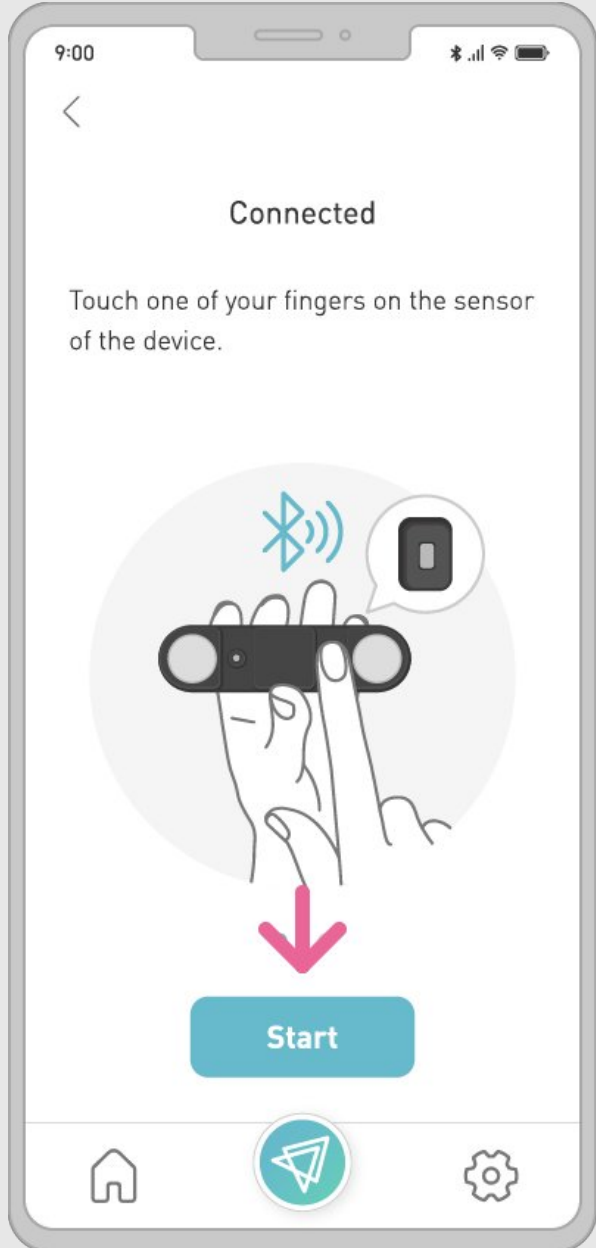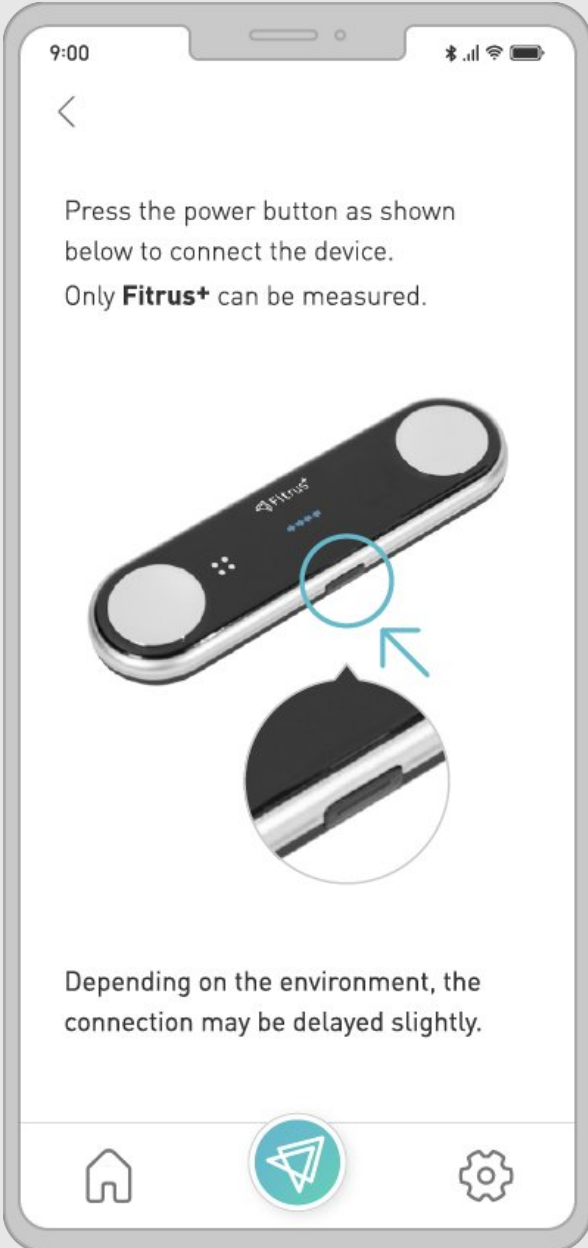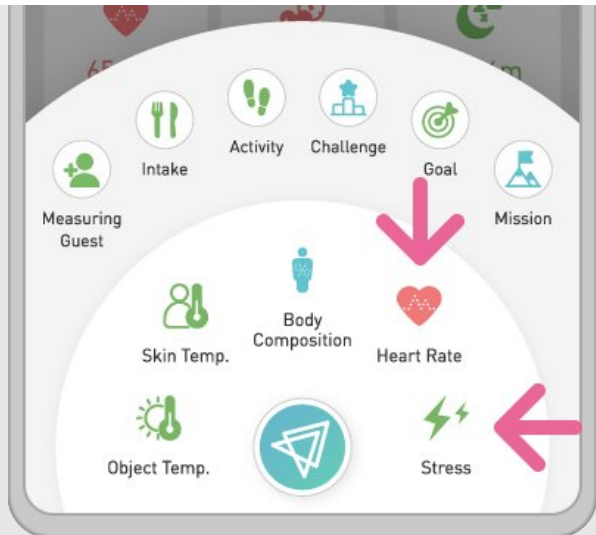
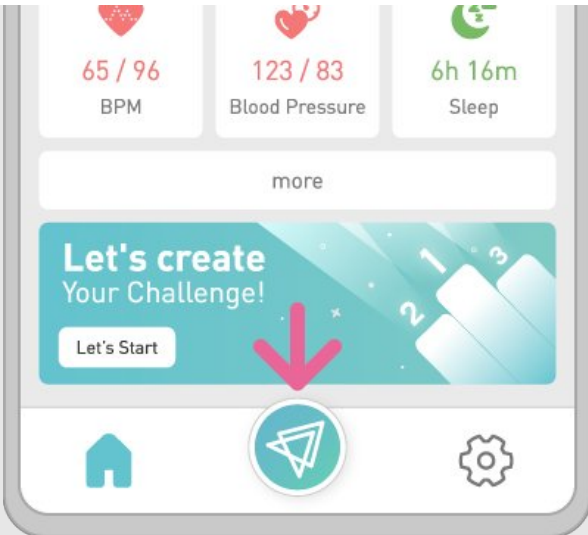


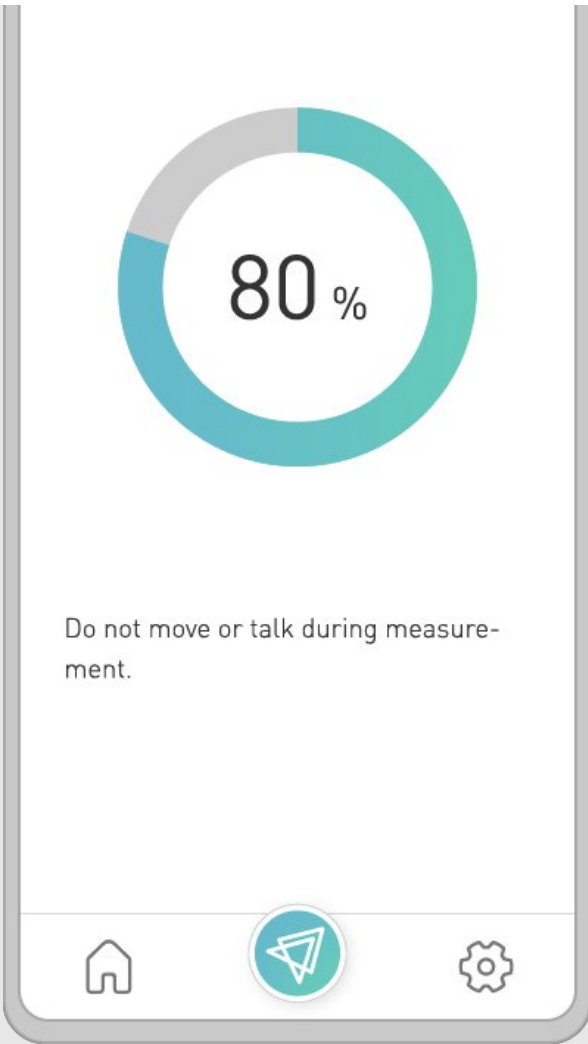


정상 연동되면 아래와 같이 디스플레이에 표시됩니다.

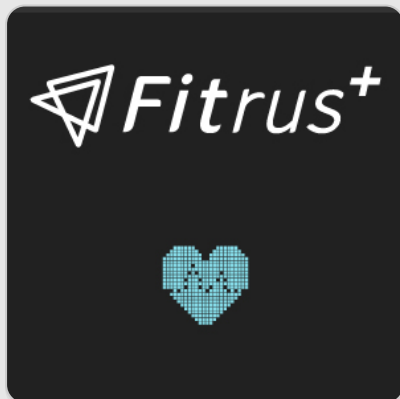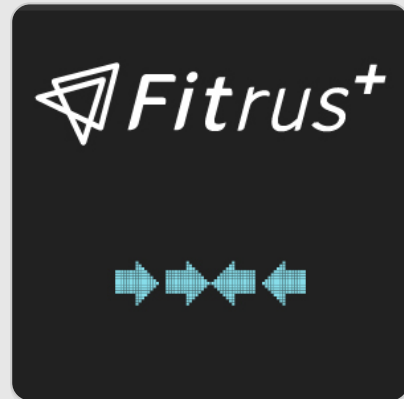

- 2 피트러스 플러스 뒷면의 사각 센서에 손가락을 올립니다.
센서를 완벽히 가리고 너무 세게 누르지 않습니다.

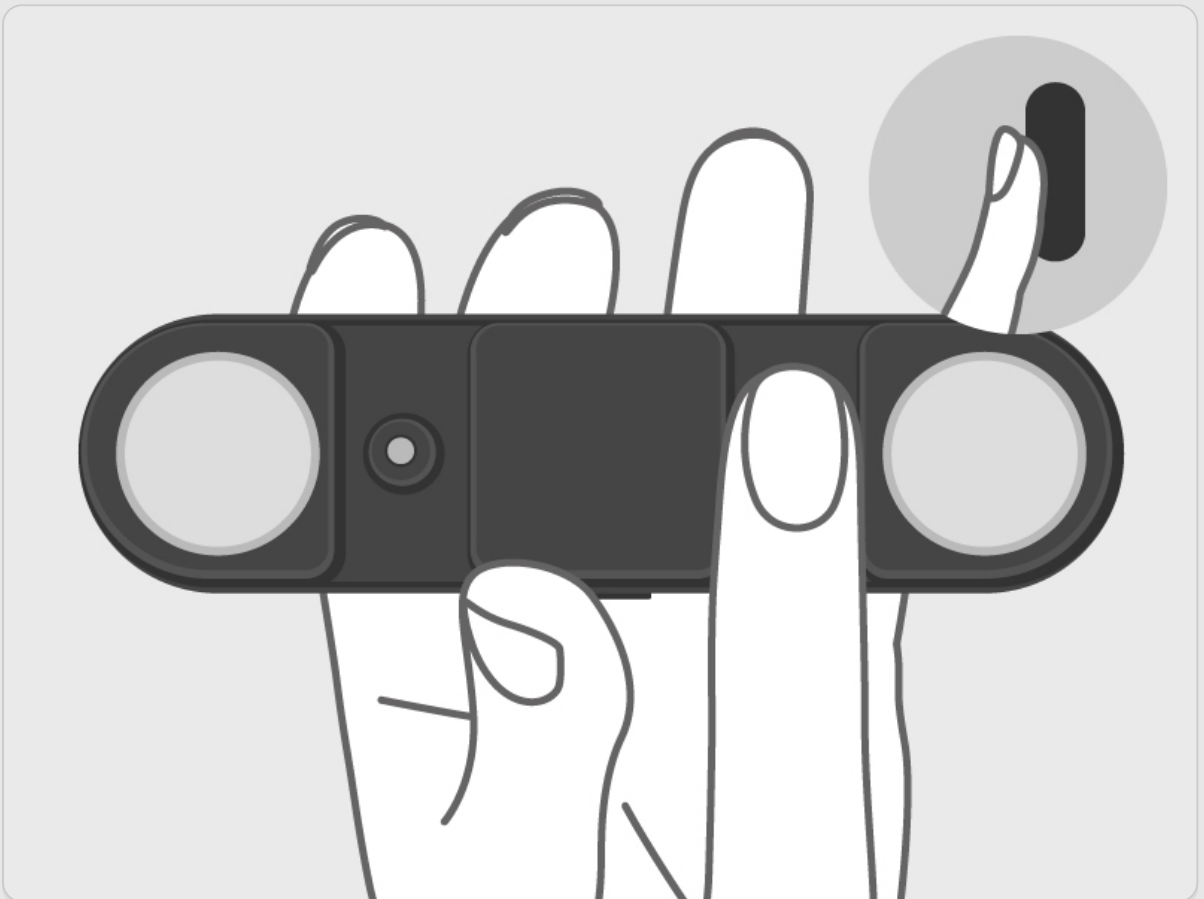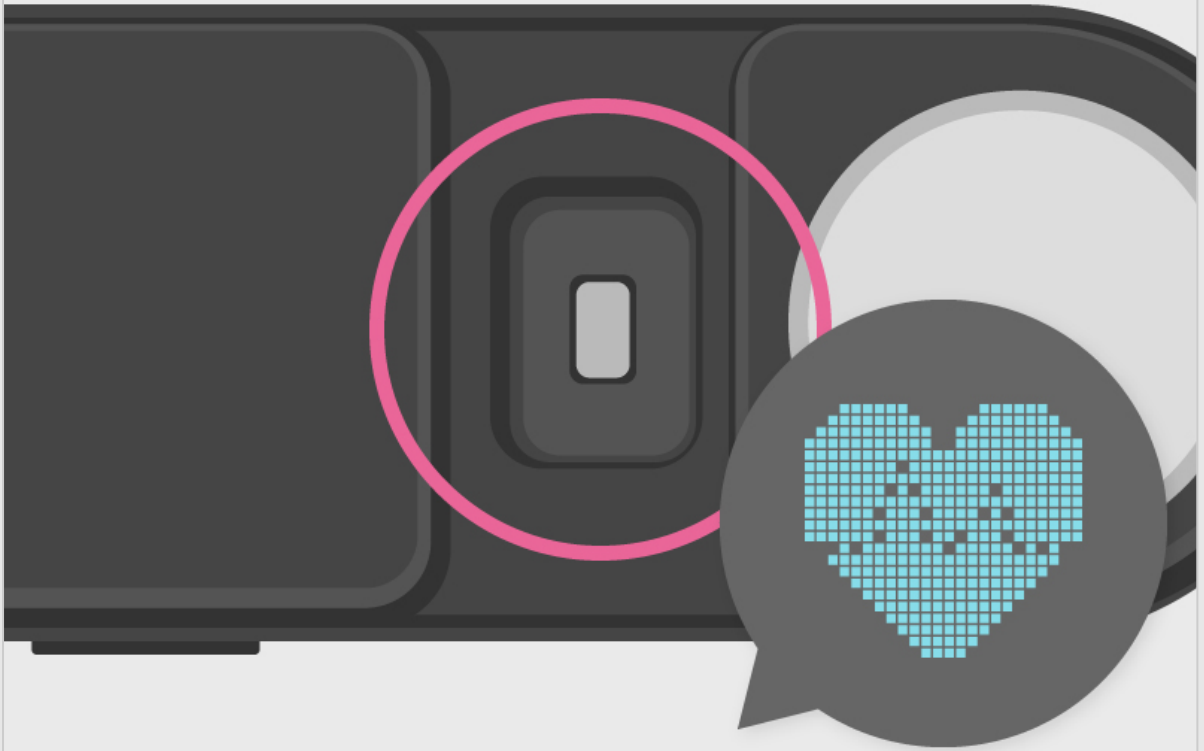



3 피트니스 앱에서 측정 결과를 확인할 수 있습니다.

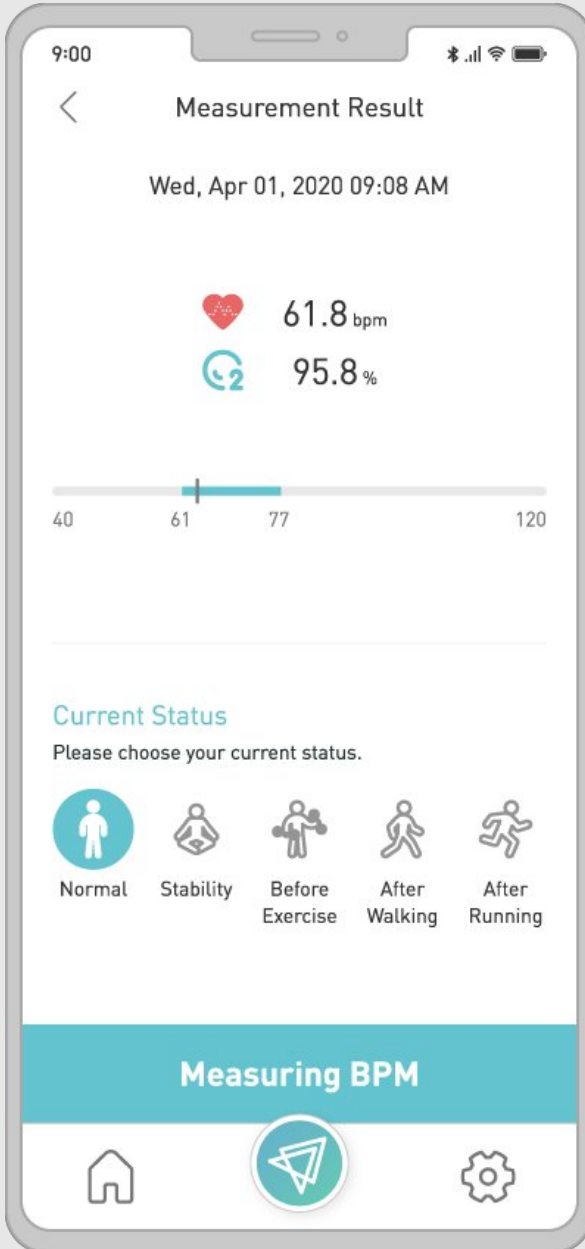

심박수




심박수

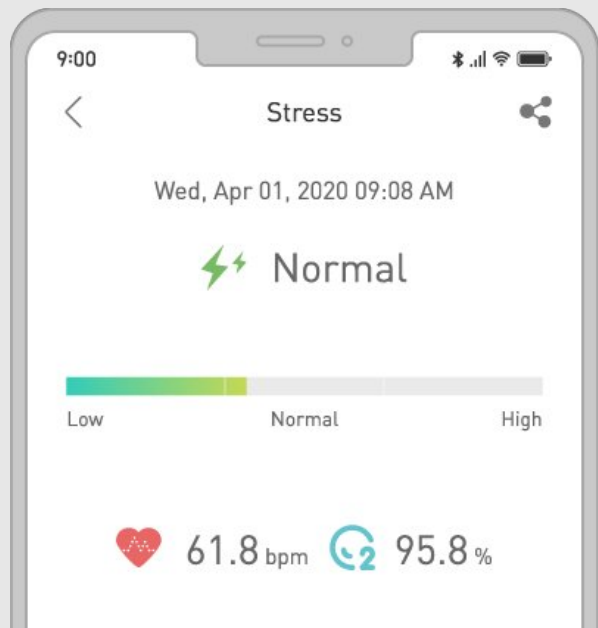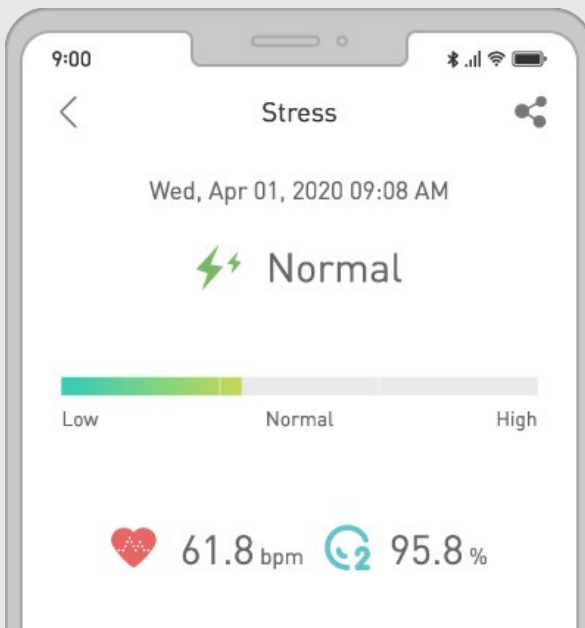




스트레스

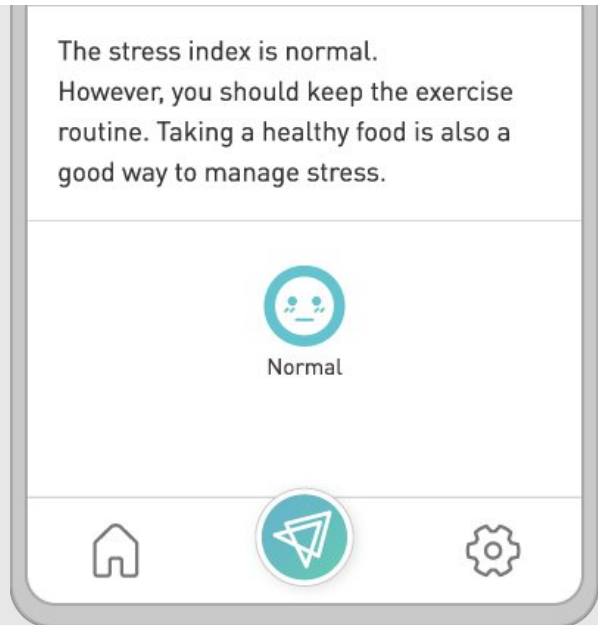


스트레스

원터치 기능


표면온도는 스마트폰 없이 측정하여 OLED 디스플레이로 바로 확인할 수 있습니다.

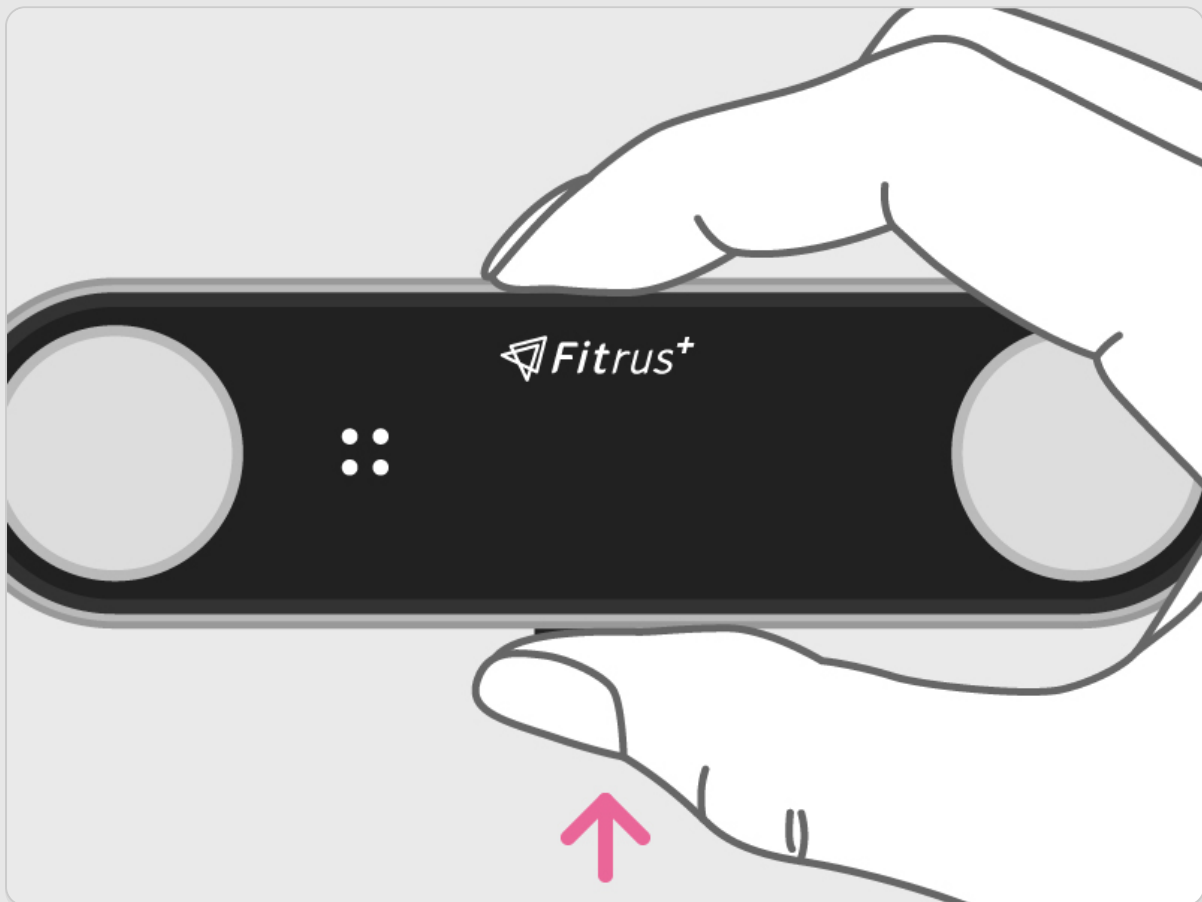


피트니스 플러스 전원을 켜주십시오.

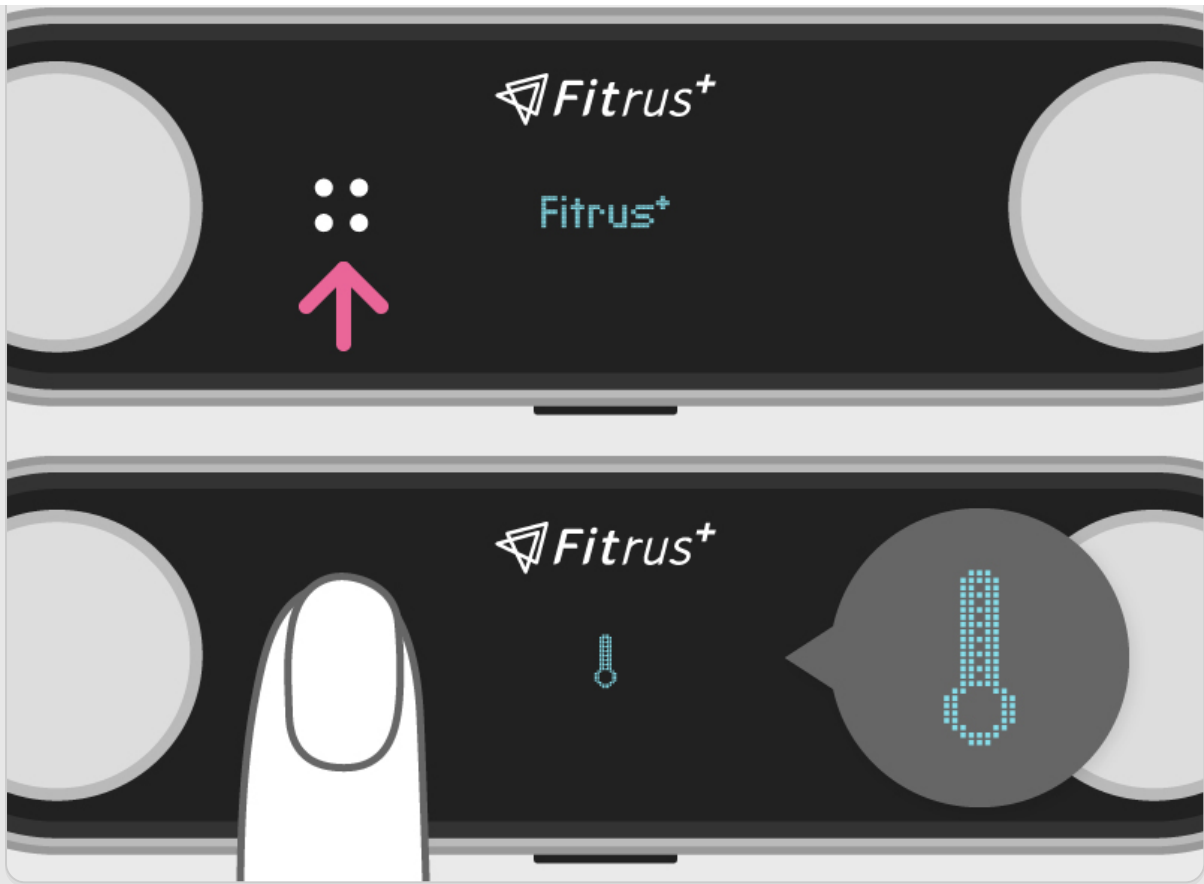


터치센서를 3초간 누르면 표면온도 원터치 기능이 활성화됩니다.

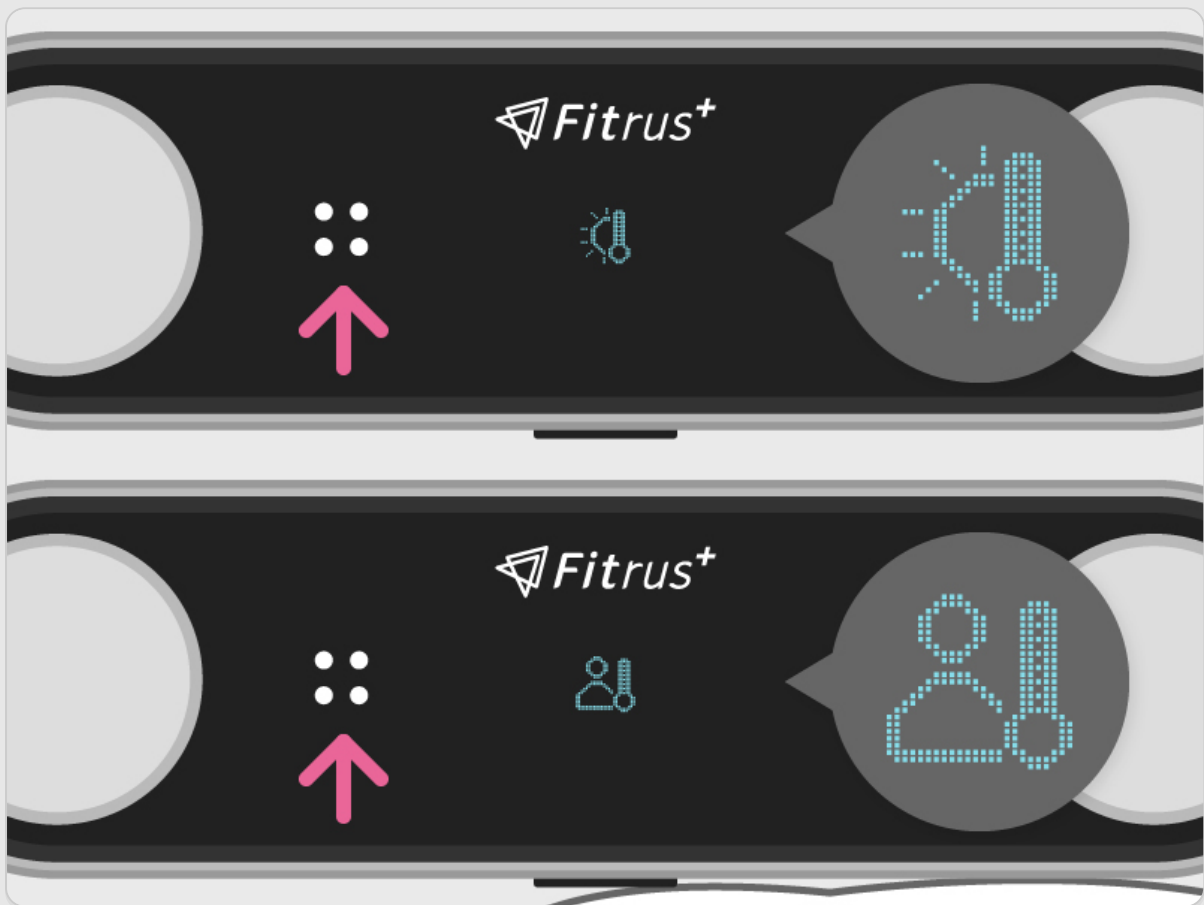


터치센서로 사물온도와 피부온도 중 측정할 항목을 고른 후 전원 버튼으로 측정합니다.

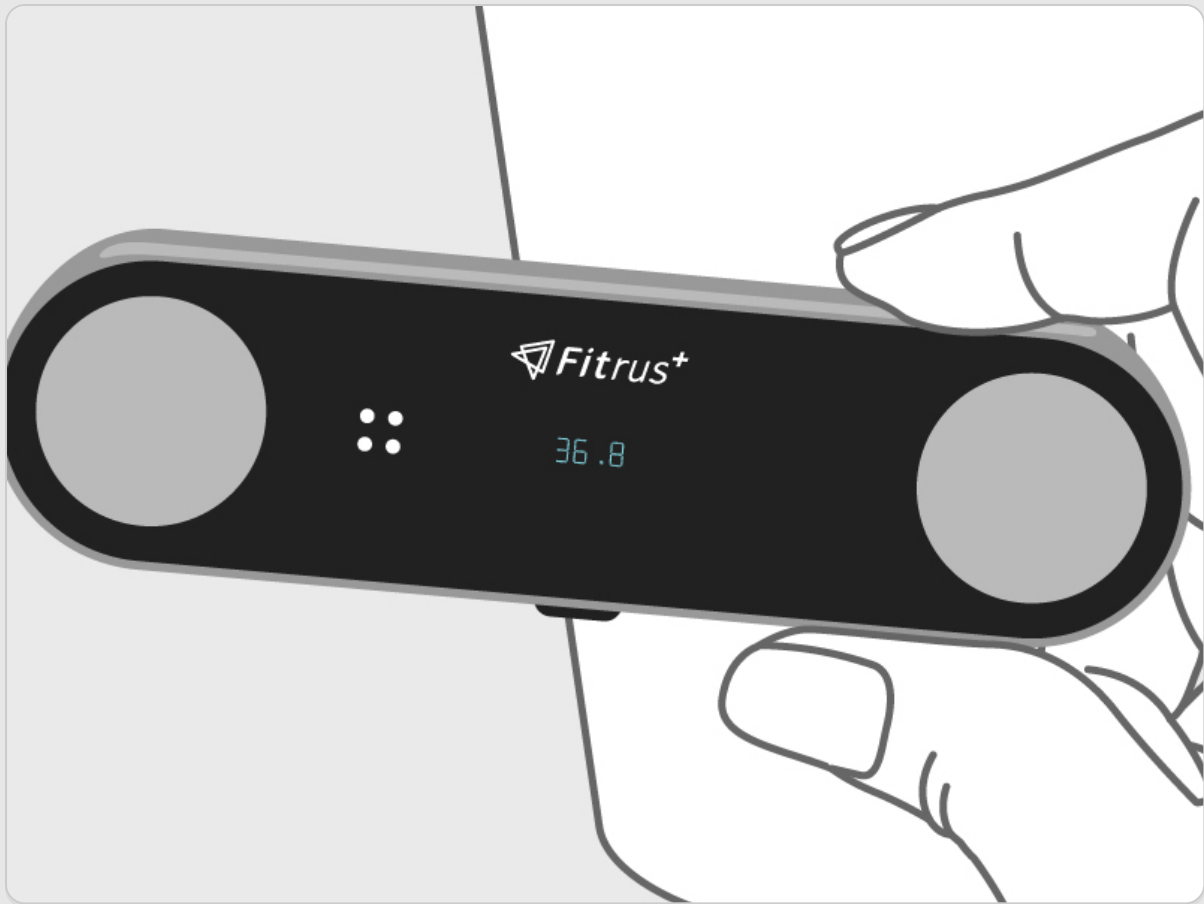

온도를 측정하고 결과를 확인합니다.

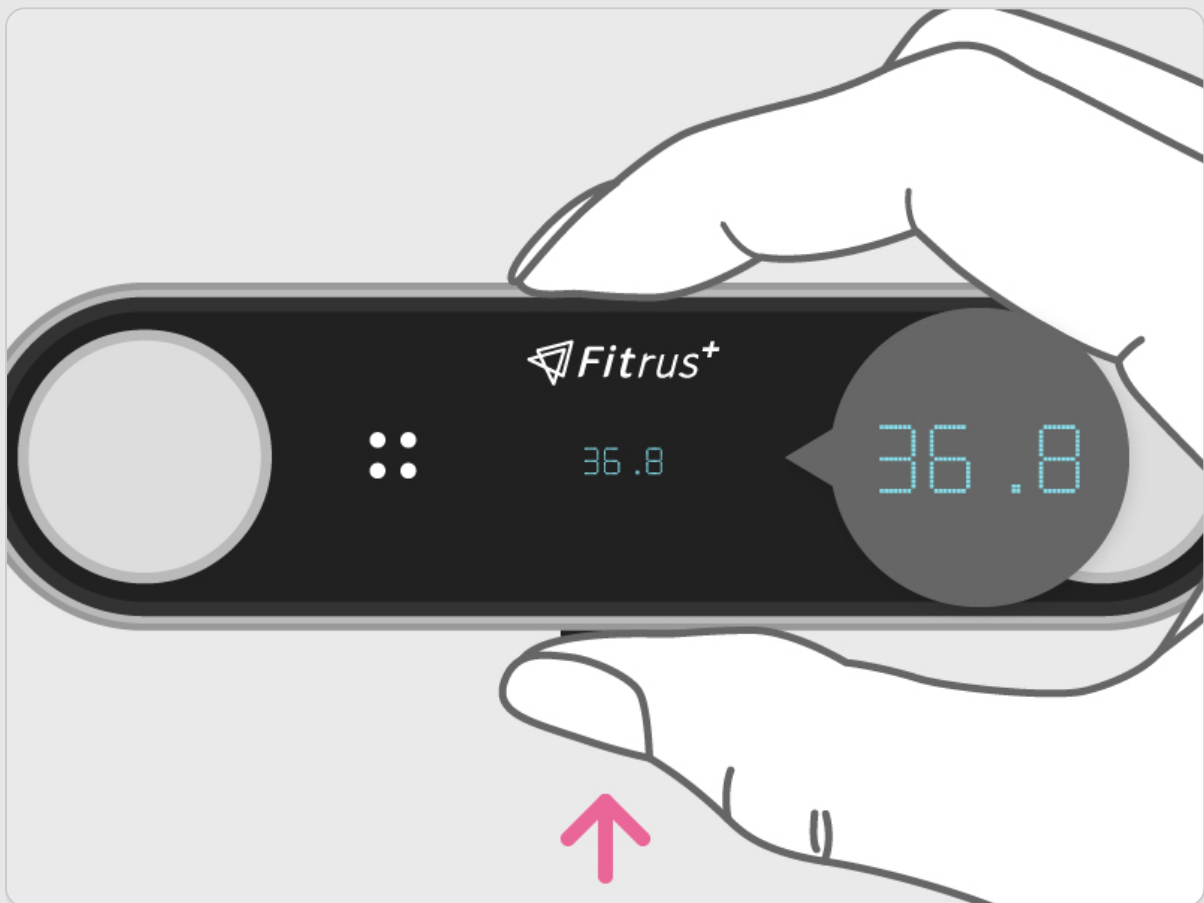

전원 버튼을 누를 때마다 측정됩니다.

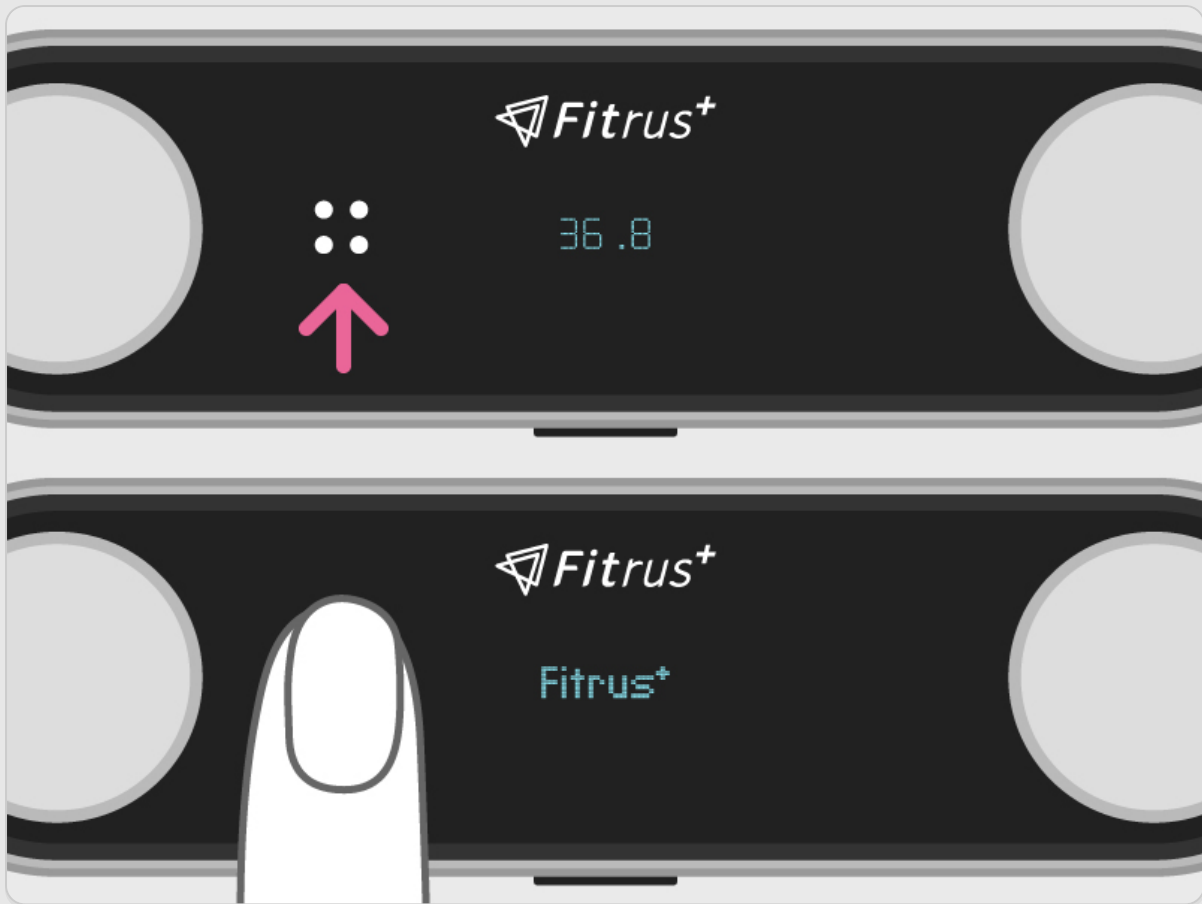

터치센서를 다시 3초간 누르면 표면온도 원터치 기능이 비활성화됩니다.


자주 묻는 질문

처음 사용할 때 충전해야 하나요?

피트러스 플러스를 완충하여 보내 드리나, 배송하는 동안 배터리 손실이 있을 수 있습니다. 제품 수령 후 완충하여 사용하는 것을 권장합니다.

피트러스 플러스의 OLED 디스플레이에 무엇이 표시되나요?

마지막으로 측정된 생체데이터, 배터리 잔량, 걸음수를 보여줍니다.

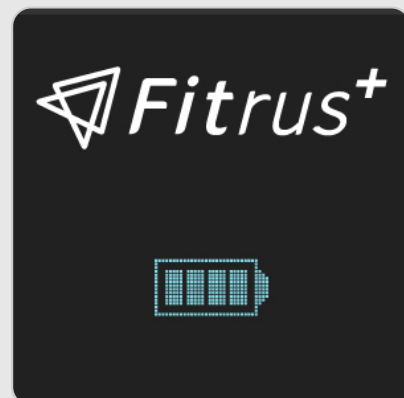

전원




걸음수


배터리 잔량



걸음수

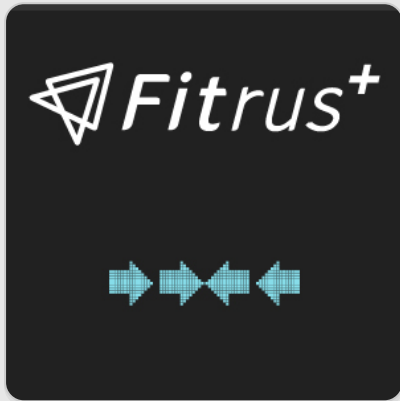


연결

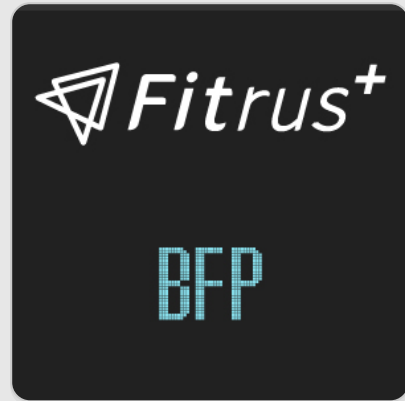


체성분




체성분

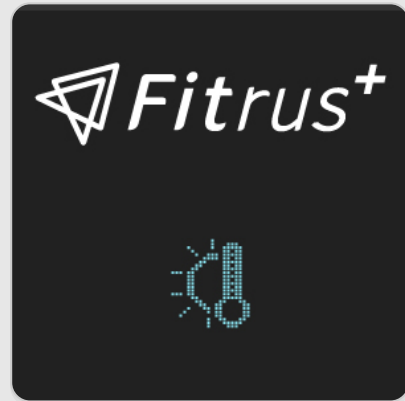


사물 온도

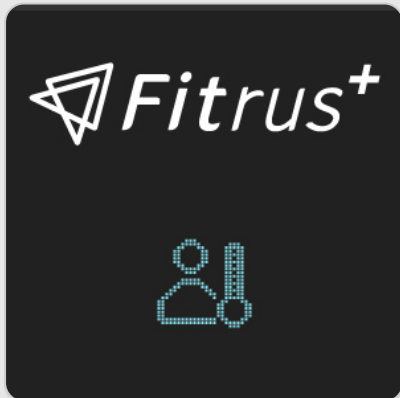


피부 온도

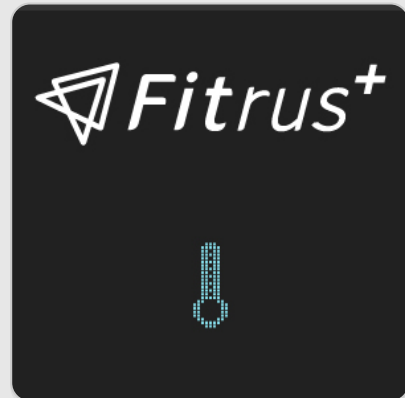

온도

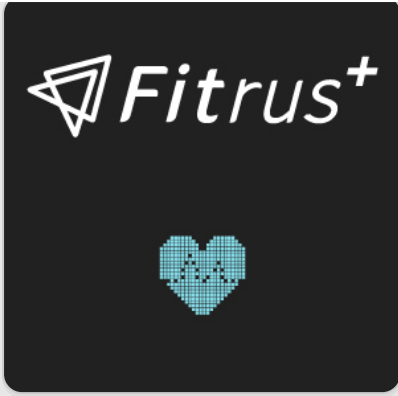

심박수

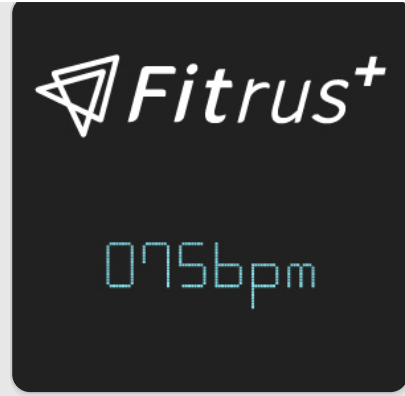

심박수

호환되는 사양은 어떻게 되나요?

▶ 안드로이드 버전 5.0 이상, Apple iOS 버전 12.0 이상의 기기와 호환됩니다.
스마트폰에 최적화되어 안드로이드 태블릿과 아이패드는 지원되지 않을 수 있습니다.
일부 기기는 지원되지 않을 수 있습니다.

피트러스 앱에서 활동량은 어떻게 연동하나요?

연동 설정으로 스마트폰의 걸음수·피트러스 플러스·전체걸음 중 선택할 수 있습니다.


피트러스는 다른 언어로 설정할 수 있나요?

피트러스 앱의 ⚙️ 설정 > 언어 메뉴에서 선택할 수 있습니다.
시스템 기본값, 한국어, 영어, 일본어, 중국어가 제공됩니다.
시스템 기본값으로 설정할 경우, 스마트폰 언어 설정에 맞춰 피트러스 앱 언어가 설정되며 기타 언어는 영어로 지원됩니다.

피트러스 플러스를 리셋하는 방법은 무엇인가요?

전원 버튼을 약 5초간 누르면 리셋됩니다.

자세한 내용은 웹 FAQ에 접속하여 확인하십시오.

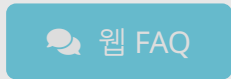

경고

- ▶ 피트러스 플러스는 의료 기기가 아니며, 질병의 진단·치료·치유·예방을 위한 제품이 아닙니다.
- ▶ 생체전기저항분석법(BIA)을 이용하여 50kHz 약 150uA 이하의 미세전류를 사용하므로 측정 중 전류가 느껴지지 않습니다.
만약 측정 중 전류가 느껴진다면 사용하지 마십시오.
- ▶ 심장박동 조절기·심전도 의료기·인공심장·인공심폐기 등의 생체 기기에 영향을 줄 수 있으므로 함께 사용하지 마십시오.

- ▶ 임신 혹은 생리 기간에 측정 오차가 심할 수 있습니다.
안전을 위해 임신부·노약자·극도의 심신 허약자는 사용하지 마십시오.
- ▶ 초고도비만 또는 저체중이거나 만 13세 이하일 경우, 측정이 원활하지 않을 수 있습니다.
측정 문제가 계속되면 보증기간 내 고객센터로 문의하여 주십시오.

주의

- ▶ 전자레인지 등 강력한 전자기파를 발생시키는 기기 근처에서 사용하지 마십시오.
측정 오류가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 배터리에 중금속이 포함되어 있으니 절대로 먹거나 분해하지 마십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ▶ 피트니스 플러스와 액세서리·배터리 등을 폐기할 때는 반드시 지역 법을 준수해야 합니다.

보증 규정

- ▶ 피트니스 플러스를 사용하면서 문제가 발생한다면 아래 채널로 문의해 주십시오.

 osd.sale@

- ▶ 보증기간은 구매 후 1년이며, 사용설명서에 따른 정상적인 사용 상태에서 제품이 고장 났다면 무상으로 교환 받을 수 있습니다.
- ▶ 보증기간 후에는 유상으로 교환 받을 수 있습니다.
- ▶ 제품 교환은 동일 제품·색상이 원칙입니다.
- ▶ 제품 교환 시 운송비는 고객 부담입니다.
- ▶ 아래의 상황에서는 보증기간 중에도 유상 서비스가 제공될 수 있습니다.
충격에 의한 고장 또는 손상
제품 내부에 물이나 액체가 들어가며 생긴 부품 손상
잘못된 사용이나 부주의, 부당한 수리나 개조
사용에 따른 외관 변화

스펙

Fitrus Plus	FR-B10	대한민국	11×3.4×1.25cm	45g	대기시간 (총전식)
-------------	--------	------	---------------	-----	------------

약 150 μ A 이하

상	DC	BLE	5	100~950 Ω
체	5V	4.2	초	

