

iOSとAndroidで対応可能です。



OSD
ONESOFTDIGM

使用前にこの説明書を読み、安全に正しく使用してください。

01 機能

 **Fitrus**


 **Fitrus A**



 **Fitrus Light**



 **Fitrus Pro**

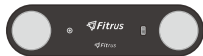

BIA



BMI



体水分



基礎代謝



心拍



ストレス



温度



血圧



HRV



連続血圧

Fitrus Pro



Fitrus Light



Fitrus A



02 特徴

FRA-W10 サイズ 10×2.9×1.2 cm | 重さ 25 g

 **Fitrus A**

電源ボタン


ボタンをそっと押すと電源がつきスマホと連動されます。
測定完了時に電源が消えます。

LEDインジケータ

電池残量と測定通知を表示します。

4つの電極センサー

両手の親指と人差し指で握って体成分を測定する4つの電極センサーです。

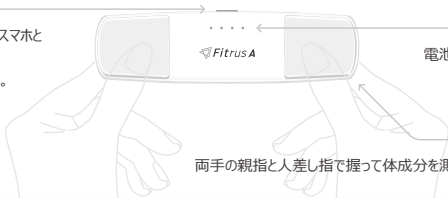

構成



USBケーブル



使用説明書

FRL-B10 サイズ 13×3.5×1.2 cm | 重さ 40g

 **Fitrus Light**

電源ボタン

ボタンをそっと押すと電源がつきスマホと連動されます。
測定完了時に電源が消えます。

心拍 & ストレス測定センサー

心拍数とストレスを測定します。

4つの電極センサー

両手の親指と人差し指で握って
体成分を測定する4つの電極センサーです。

充電インジケータ

受電中は赤色、充電が完了すれば緑色で表示されます。

LEDディスプレイ

最新の測定値、バッテリーの残量を表示します。



構成



USBケーブル



使用説明書

FR-B30 サイズ 12.6×3.4×1.36 cm | 重さ 40g

 **Fitrus Pro**

4つの電極センサー

両手の親指と人差し指で握って
体成分を測定する4つの電極センサーです。

タッチセンサー

軽くタッチするだけでディスプレイに出力される項目を変更することができます。



表面温度測定センサー

皮膚または物体の温度を
測定することができます。

PPG

心拍 & ストレス測定センサー

心拍数とストレスを測定します。

OLEDディスプレイ

最新の測定値、バッテリーの残量を表示します。

電源ボタン

ボタンをそっと押すと電源がつきスマホと連動されます。
測定完了時に電源が消えます。

構成



USBケーブル



使用説明書



▶ Google Playストア、もしくは  Appleアプリストアで**Fitrus**を検索してアプリをダウンロードしてください。
こちらの**無料アプリ**によりデバイスをより楽しく使うことができます。



QRコードでスマホにアプリをダウンロードすることもできます。

<https://thefitrus.com/app/> 🔍



Fitrusのアプリはアンドロイド5.0以上、iOS12.0以上で対応し、スマホに最適化しています。
一部アンドロイドタブレットやiPadで対応していない部分があります。

04 使用方法



- ① GPSとブルートゥース機能をONにしてアプリを実行させてください。

スマホとデバイスのブルートゥース接続は直接行う必要はありません。

Pin番号を入力しないでください。


アプリを実行し、デバイスの電源をつけると自動でブルートゥース接続されます。



- ② Fitrusアプリを実行してください。
デバイスで測定した結果はFitrusアプリに記録されます。



- ③ 新規会員登録を押して使用者の情報を入力してください。

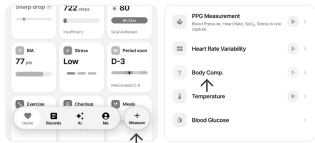

④ デバイスの電源をONにして測定画面で

測定 スタート
ボタンを押してください。



測定が終わるとデバイスは自動的にOFFになります。



⑤ Fitrus アプリを通して測定結果が確認できます。



Fitrus Proを初期化するには、
電源ボタンを約5秒間長押しすればリセットされます。




詳しい内容はQRコードでアプリの
マニュアルに接続し確認することが出来ます。

<https://manual.onesoftdigm.com>

健康目標


Fitrus アプリの健康目標機能で、自分に合った健康目標を設定し、継続的に管理できます。

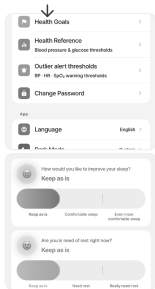


言語設定

Fitrusアプリ・マイ・言語画面にて、システムのデフォルト、韓国語・英語・日本語など、多様な言語をお選びいただけます。

システムのデフォルトに設定すると、スマートフォンの言語設定に合わせて自動的に言語が設定されます。現在対応していない言語をご使用の場合は、英語をご利用ください。

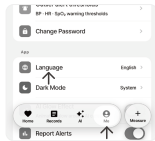


体成分分析

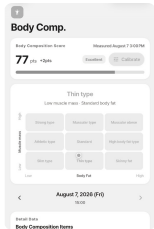

体成分スコアと体型分析から、身体の状態をひと目で確認できます。

体成分詳細

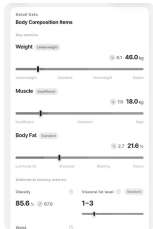


体重、筋肉量、体脂肪など、主な体成分項目を詳しく確認できます。

体成分トレンド




体成分の数値や変化の推移を確認し、健康管理に役立てることができます。

健康情報記録

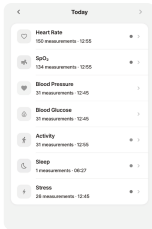


心拍数、血圧、活動量など、さまざまな健康情報の測定記録を確認できます。

AI健康分析

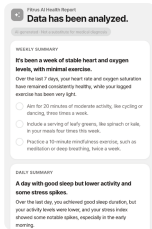

AI分析により、測定結果や健康状態を総合的に確認できます。

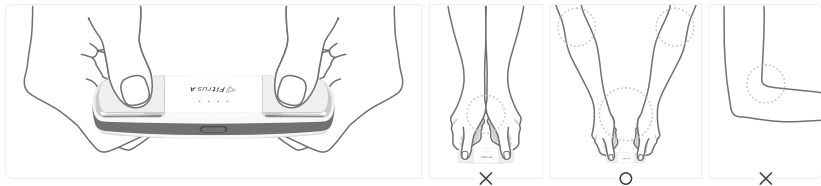

前・後の4つの電極を親指と人差し指でそっと握って腕を前にスッと伸ばしてください。

肘をしっかり伸ばして両腕はくっつかないようにしてください。

微細な電流を流す生体電気インピーダンス法で測定されるため、正しい測定姿勢を取らなければ正確な結果は得られません。

該当する製品






Fitrus A



Fitrus Light



Fitrus Pro

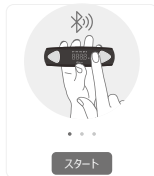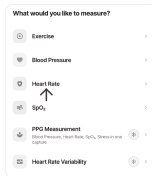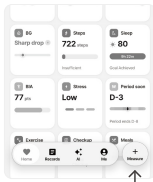

デバイスの前面の四角形のセンサーに指を置いてください。
センサーを完全に隠して強く押しすぎないようにしてください。

該当する製品



Fitrus Light



Fitrus Pro




非接触測定

裏面の丸いセンサーを測定する皮膚または物体から約2~5 cmの所に近づけます。
こめかみにかざすと比較的正確な体温を測定することができます。

体温測定

体温測定用キャップをセンサーに装着してから、体温を測定します。

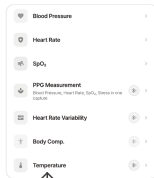


該当する製品




Fitrus Pro


表面温度はスマートフォンがなくても
OLEDディスプレイより直接確認することができます。

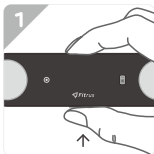


デバイスの電源を入れてください。

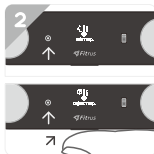

タッチセンサーで測定する項目を選択し、電源ボタンを押して測定を開始します。

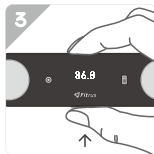

温度を測定して結果を確認します。
電源ボタンを押すと再び測定がスタートします。

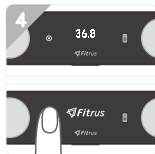

測定完了 ▶ **Fitrus**に移動して他の項目を測定、または電源をOFFにする

該当する製品




 **Fitrus Pro**

パッケージに同包されているUSBケーブルでデバイスを充電することができます。

 待機20日 | 充電3時間

製品の受取後はフル充電後の使用をお勧めします。デバイスと充電器は分離後に測定してください。

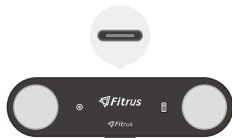

FRS-W10 サイズ 30×23.5×2 cm | ブルートゥースで**Fitrus** アプリと連動し、体重が自動的に登録されます。

Fitrusスケールに乗れば**Fitrus**アプリの体重や体成分測定画面に別途の操作なしでも体重がアプリに保存されます。

Fitrusアプリのダッシュボードから体重、または体成分カードを選択します。

測定ボタンを押します。


Fitrusスケールに乗れば自動で測定します。

体重が表示され、ディスプレイの数値が止まるまで動かないようにしてください。

測定値が**Fitrus**のアプリに表示されると体重計から降りてください。

測定が終われば確認ボタンを押し、

測定した体重を保存してください。

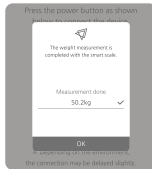

自動オン、オフ

バッテリーの充電

5 kg 以上検出

単4形乾電池

FRW-B10 | 24時間、健康情報や活動、睡眠をモニタリングするスマートウォッチです。

充電 付属のマグネット式充電ケーブルを接続し、満充電してから使用します。

接続 スマートフォンのBluetoothをオンにし、Fitrusアプリでウォッチを選択して接続します。

電源オン/オフ ウォッチ右側の電源ボタンを長押しすると、電源をオン/オフできます。

基本操作 画面をタッチまたはスワイプしてメニューを操作します。右側のボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。



血圧

SpO₂

歩数



ストレス



心拍



血糖



睡眠



HRV



ウォッチ背面にマグネット式充電ケーブルを接続して充電します。

ディスプレイ

防水

使用時間

1.85インチ AMOLED

IP68

最大7日間

- ▶ デバイスは医療機器ではありません。疾病の診断、治療、治癒、予防のための製品ではありません。
生体電気インピーダンス法(BIA)と自社開発の独自のアルゴリズムにより体の成分を測定するデバイスです。
 - ▶ 心拍数調節器、心電図医療器、人工心臓、人工心肺器などの生体機器に影響を与えることがあるので、一緒に使用しないでください。
 - ▶ BIA基盤を使用し、50 kHz、約150 μ A 以下の微細電流を使用しており、測定中は電流を感じることはありません。
もし測定中に電流を感じたら、使用を辞めてください。
 - ▶ 妊娠中や生理期間に測定すると誤差が出る場合があります。
安全のために妊娠されている方、お年寄り、極度の心身虚弱体質の方は使用をされないでください。
 - ▶ 超高度肥満や低体重、満13歳以下の場合は測定がうまくいかない場合があります。測定する時に問題が繰り返し続いた場合は、
保証期間内(Makuakeでは3カ月、その後メーカーにて9カ月)であればお問い合わせしてください。
-
- ▶ 使用説明書はハードウェアやソフトウェア、
製品の構成などの性能向上またはその他の理由で使用者の同意や別途のお知らせなしに変更することがございます。
使用説明書に表示されている一部のイメージは実際のものとは多少異なることがあります。

- ▶ 低出力無線周波数機器の取得検査認証を受けないと、
会社または使用者は周波数を変更したり出力を増加させたりすることができず、設計特性と機能を変更することができません。
低出力無線周波数機器の使用は飛行安全に影響を与えたり、合法的な通信を妨げてはいけません。
通信干渉が見つかったら、すぐに使用を停止し干渉がないまで改善する必要があります。
合法的な通信とは、通信管理法に基づいて運営される無線通信を意味します。
低出力無線周波数機器は、合法的な通信や産業、科学および医療用電波放射電気機器の干渉を甘受する必要があります。
- ▶ デバイスを長期間使用せずに保管する場合は、適切な温度で40～60%程度充電されていることを確認してください。
放電した状態で長期間保管すると、バッテリーが損傷します。
- ▶ 電子レンジなどの強力な電磁波を使用するものの近くでは使用しないでください。
測定に誤差が出る場合がございます。
- ▶ バッテリーに重金属が含まれているので絶対に食べたり分解しないでください。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ▶ デバイスとアクセサリ、バッテリーなどは破棄する時は地域の法律に基づいて破棄してください。

＞ デバイスを使用しながら問題が生じた場合はこちらにてお問い合わせしてください。



support@onesoftdigm.com

-
- ＞ 製品の保証期間は購入後1年であり、使用説明書による正常な使用状態で製品が故障が起こった場合無償で交換されます。
- ＞ 保証期間後は有償にて交換することが出来ます。
- ＞ 製品の交換は同一製品、カラーが原則となります。
- ＞ 製品の交換時の配送代はお客様の負担となります。
- ＞ 次の場合は保証期間でも有償サービスにて対応となります。
- 衝撃による故障、または損傷
 - 間違えた使用方法、不注意、不当な修理や改造
 - 製品内部に水や液体が入ったための部品損傷
 - 使用による外観の変化



製造国	韓国
メーカー名 製造社	株式会社ONESOFTDIGM
通信	BLE 4.2
電力	DC 5v
製造年月日	別途表記

電流測定	約150 μ A以下
周波数範囲	50 kHz
測定範囲	100~950 Ω
推奨使用範囲	130~220 cm 30~180 kg
使用環境	10~40 $^{\circ}$ C 30~75 %RH